

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN:70907000

エム・ワイ ルージュ

【形状・構造及び原理等】

<形状>



無印 コンパクトタイプ

<種類>

イエロールージュ:樹脂(レジン)専用、最終仕上、艶出し用

ホワイトルージュ:金属専用、最終仕上、艶出し用

ブルールージュ:共用、最終仕上、艶出し用

ブラウンルージュ:共用、中仕上

弾性レジン用:弾性レジン(ノンクラスプデンチャー)専用、
最終仕上、艶出し用

原材料:研磨材(酸化アルミニウム)

原理:パフ材等に塗布し、器材(ハンドピース又はレーズ)で
補綴物等と接触させることで補綴物等を研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材であり、主な用途は金属床、レジン床の中仕上げまたは最終仕上げ

【使用方法等】

術者は本品をパフ材等に塗布し、補綴物等の研磨を行う。

【使用上の注意】

研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること

【保守・点検に係わる事項】

不純物が入っていないか点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名:株式会社ヨシオカ

住所:〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号:03(3614)1917

ファックス:03(3614)1918

製造業者名:株式会社ヨシオカ