

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000
エム・ワイ パウダー ダッシュ

【形状・構造及び原理等】



原材料：研磨材（酸化アルミニウム）
原理：バフ材等に塗布し、器材（ハンドピース又はレース）で補綴物等と接触させることで補綴物等を研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材であり、主な用途は金属床、レジ
ン床の最終仕上げ

【使用方法等】

術者は本品を水等で溶かし、バフ材等に塗布し補綴物等の研磨を
行う。

【使用上の注意】

研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マス
ク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の 微粉が
目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水
で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的
負荷）及び汚染を受けないように保管すること

【保守・点検に係わる事項】

不純物が入っていないか点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ
住所：〒131-0034
東京都墨田区堤通1-7-13
電話番号：03(3614)1917
ファックス：03(3614)1918
製造業者名：株式会社ヨシオカ