

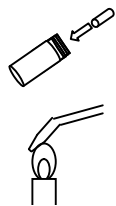
機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 JMDN70680000
ストップングキャリア

【形状・構造及び原理等】

キャリア本体材料：真鍮、
原理：手動式

【使用目的又は効果】

歯科用仮封材等を歯牙に充填、塗布するため等に用いる再使用可能な手用器具である。

【使用方法等】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
2. 指掛け部分は取り外し可能になっていますので取り外した後、5 cm位の長さに切断したストップングをキャリア本体の中に詰める
3. 指掛けを取り付けた後、プロテクトカバー（黒色）を指掛けの側に移動させます。プロテクトカバーは火焰にさらすと溶けますのでご注意ください。キャリア先端部を加熱し、ストップングを軟化させます。
4. プロテクトカバーをキャリア本体先端部へ移動させます。熱せられたキャリア先端部が口蓋に接しないように注意深く充填を行います。
5. キャリア本体に残ったストップングを再使用する時は2の手順に戻って御使用ください。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意：使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
2. 真鍮使用：真鍮にメッキを施した素材である。
3. 保管上の注意：
 - 化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
 - 滅菌後は水気のない安全な場所に保管すること。
4. 取り扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。使用時には、プロテクトカバーをキャリア本体先端部に移動させ、熱せられたキャリア先端部が唇等に接しないよう十分注意しながら充填すること。
5. 加熱の注意：過熱しすぎないこと。加熱しすぎると変形、変色、破損等の原因となる。また、加熱する際はキャリアカバーを最後部まで引渡し、加熱箇所はキャリア先端部だけとする。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

1. 使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、破損・ヒビ・キズ・変色・腐食・移動部の動き等に異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。また長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。また使用後にストップングが残留している場合はス

トップングが軟化している時に押し出すか、再度過熱することにより軟化させ、残留がないようにすること。

2. 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用すること。
3. 機能水の使用禁止：超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
4. 洗浄、消毒、滅菌上の注意：
 - 次の薬剤は金属腐食を起こす虞があるので、使用しないこと。塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン。
 - 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書または取り扱い説明書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - 使用後は、できるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、サビやシミ等の原因となることがある。
 - 加熱滅菌器（オートクレープ滅菌器等）の乾燥温度（135℃以下）に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
 - 「もらいさび」を防ぐ為に、錆びている器具と一緒に滅菌しないこと。
5. クレンザー（磨き粉）、金属ウール、金ブラシの使用禁止：錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウールや金ブラシは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ