


機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN 31814000

コーク型 ピンセット

【形状・構造及び原理等】

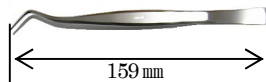

公差：±10mm
材料：ステンレス
原理：手動式

【使用目的又は効果】

2つの先細のバネ性先端部をもつ歯科手術器具をいう。この先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【使用方法等】

術者はこの先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意：使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）すること。
2. 素材はステンレス鋼である。ステンレス鋼は鉄と比べて錆びにくい金属であるが、使用方法、環境などによっては腐食することがあるので使用上の注意を守ること。
3. 保管上の注意：
 - 化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
 - 滅菌後は水気のない安全な場所に保管すること。
 - 「もらいさび」を防ぐ為に、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
4. 取り扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしないこと。
5. 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用すること。
6. 機能水の使用禁止：超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
7. 加熱の禁止：本品は直接火炎にさらさないこと。加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。
8. 洗浄、消毒、滅菌上の注意：
 - 次の薬剤は金属腐食を起こす虞があるので、使用しないこと。次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン。
 - 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書または取り扱い説明書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - 使用後は、できるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、サ

ビヤシミ等の原因となることがある。

● 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度（135℃以下）に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。

● アルコール等の薬剤を使用した高圧滅菌は劣化の原因となるため使用しないこと。

9. クレンザー（磨き粉）、金属ウール、金ブラシの使用禁止：錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウールや金ブラシは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後に、破損・ヒビ・キズ・変色・腐食・稼動部の動き等に異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。また長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。点検後、滅菌をすること。滅菌のための滅菌バック詰め等にあたっては、確実に滅菌できるように配慮すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ