

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN70682000
エム・ワイ ラバーボール

【形状・構造及び原理等】



型番	特大	大	小
直径	130mm	105mm	87mm
高さ	96mm	74mm	55mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ
住所：〒131-0034 東京都墨田区堤通1-7-13
電話番号：03(3614)1917
ファックス：03(3614)1918
製造業者名：株式会社ヨシオカ

公差：±10mm 原理：手動式 材料：ゴム

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する器具

【使用方法等】

術者は本品に歯科材料を入れた後へら等で練和又は混和する。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意：使用前に必ず洗浄すること。
2. ゴム使用：素材はゴムである為、高温で使用しないこと。
3. 二次加工の禁止：破損などの原因になるので、器具に対して切削や打刻（自分の名前を入れる等）といった二次加工（改造）は絶対に行わないこと。
4. 取り扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしないこと。
5. 破損等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

1. 使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、破損・ヒビ・キズ・変色・腐食等、異常がないか確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。また使用中に付着した際はできるだけ早めに洗浄すること。
2. 保管者の限定：本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。