

機械器具39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000

研磨ホルダー

【形状・構造及び原理等】



材料：炭素工具鋼

原理：手動式

【使用目的又は効果】

本品は歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる器具である。中でも本品はクラスプを研磨する際加熱して手では保持しにくかったり、飛散させたりするので、保持を容易に、確実にする、プライヤーである。

【使用方法等】

術者は本品を把持し、補綴物等を保持する。

【使用上の注意】

1. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために注意事項を必ず守ること。
2. 炭素工具鋼で出来ているので使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
3. クラスプ線の太さは0.9～1.0のものを使用する事。パー線、パラタル線の屈曲には使用しない事。
4. 取り扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

使用前、使用後の点検：使用前、使用後に、嘴部にキズや食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。時々、関節部にミシン油を塗布する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ