

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000
エレファント ポリッシャー

【形状・構造及び原理等】



型番	形状	砥粒	φ
ビックP-01	ポイント	シリコンカーバイド	15
ビックPEX/ハイトックポリ	ポイント	シリコンカーバイド	15
ビックP-02 円筒	ポイント	シリコンカーバイド	15
ドクターポイント	ポイント	シリコンカーバイド	13
S	ポイント	シリコンカーバイド	10
L	ポイント	シリコンカーバイド	20
ミニポイント	ポイント	シリコンカーバイド	13
ホイールW-01	ホイール	シリコンカーバイド	24
ホイール軸付	ホイール	シリコンカーバイド	25
ハード	ホイール	酸化アルミニウム	25
ハード軸付	ホイール	酸化アルミニウム	25
ハイグレードP	ポイント	シリコンカーバイド	12
ハイグレードS	ポイント	シリコンカーバイド	8
ハイグレードミニ	ポイント	シリコンカーバイド	13
マゼンタビック	ポイント	酸化アルミニウム	15
マゼンタホイール 軸付	ホイール	酸化アルミニウム	25
ハーフ	ホイール	酸化アルミニウム	22
ソフトホイール(ブラウン)	ホイール	酸化アルミニウム	24
ソフトホイール(ブラウン以外)	ホイール	シリコンカーバイド	24
ソフトホイール軸付(ブラウン)	ホイール	酸化アルミニウム	25
ソフトホイール軸付(ブラウン以外)	ホイール	シリコンカーバイド	25
ダブル	ホイール	シリコンカーバイド	24
ソフトホイールレース用(ブラウン)	ホイール	酸化アルミニウム	50
ソフトホイールレース用(ブラウン以外)	ホイール	シリコンカーバイド	50
スーパーハード	ホイール	酸化アルミニウム	24
スーパーハードレース用	ホイール	酸化アルミニウム	70

公差：±5mm

原理：器材（ハンドピース又はレース）で回転させ補綴物等と接触させることで補綴物等を研削する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる器材

【使用方法等】

術者はハンドピース又はレースに装着した後、補綴物等の研削を行う。

【使用上の注意】

1. 本材は長時間連続で使用すると過熱を帯びることがあるので、断続的に使用する様に注意すること。
2. ハンドピースに装着する物は適正使用回転数（6000RPM以下）を超えた場合には、破折して怪我をするおそ

れがあるので、適正使用回転数を厳守すること。

3. 無理な角度、過度の加圧での使用は破損、破折を招くので避けること。
4. マンドレールを用いる物は添付の座金（二種類の内、凸の座金を上）を装着し、十分な強度のあるマンドレールを使用すること。
5. ハンドピースに装着する物はハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを装着し、半チェックでないことを確認すること。
6. レースに装着し、装着部が補強されている物は奥まで入れ込むと抜けづらくなりますので、とばくちで留めてください
7. 研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること

【保守・点検に係わる事項】

1. 器材（ハンドピース又はレース）に装着できるか確認をとること。
2. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ
住所：〒131-0034 東京都墨田区堤通1-7-13
電話番号：03(3614)1917
ファックス：03(3614)1918
製造業者名：株式会社ヨシオカ