


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000
エレファント ダイヤグレース

【形状・構造及び原理等】

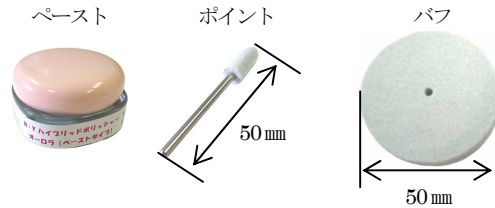

公差：±5mm

材料：研磨材（酸化アルミニウム、ダイヤモンド）

フェルト（ペーストを除く）

原理：器材（ハンドピース又はレーズ）で回転させ補綴物等と接触させることで補綴物等を研磨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ

【使用目的又は効果】

本品は補綴物等の研磨に用いる器材である。

主としてハイブリッドセラミック、メタルボンド等歯科技工用の補綴物の最終研磨に用いる。

【使用方法等】

術者はハンドピース又はレーズに装着、若しくはペーストを塗布した後、補綴物等の研磨を行う。

【使用上の注意】

1. 本材は長時間連続で使用すると過熱を帯びることがあるので、断続的に使用する様に注意すること。
2. ハンドピースに装着する物は適正使用回転数（6000RPM以下）を超えた場合には、破折して怪我をするおそれがあるので、適正使用回転数を厳守すること。
3. 無理な角度、過度の加圧での使用は破損、破折を招くので避けること。
4. ハンドピースに装着する物はハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを装着し、半チャックでないことを確認すること。
5. 研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること

【保守・点検に係わる事項】

1. ハンドピースに装着できるか確認をとること。
2. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること
3. 不純物が入っていないか点検する。