

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000  
**ジルコニアシャイン**

**【形状・構造及び原理等】**



公差：±5 mm

材料：研磨材（酸化アルミニウム、ダイヤモンド）

原理：バフ材等に塗布し、器材（ハンドピース又はレース）で補綴物等と接触させることで補綴物等を研磨する。

**【使用目的又は効果】**

本品は補綴物等の研磨に用いる器材である。

主としてハイブリッドセラミック、メタルボンド等歯科技工用の補綴物の最終研磨に用いる。

**【使用方法等】**

術者はバフ材等に塗布し、補綴物等の研磨を行う。

**【使用上の注意】**

研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

〔保管方法〕

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること

**【保守・点検に係わる事項】**

不純物が入っていないか点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堀通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ