

医療用品4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

ドレープR

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

・本品は不織布又はフィルム製のドレープである。使用部位や手術手技に応じて、寸法、形状、開窓部の有無等が異なる。また粘着テープ、付属品を有したものもある。

＜滅菌方法＞（滅菌して供給する場合）

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布の用具である。本品は患者を手術中の熱、炎又は他のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。

＜使用方法＞

1. 本品を包装袋外側と接触しないように取り出す。
2. 本品で患者身体の適切な部位を覆う。
3. 手技が完了したら本品を外し廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、廃棄すること。
- 2) 粘着材を使用している製品については、個人差により皮膚刺激性が発生する場合がある。患者の皮膚に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

＜その他の注意＞

- 1) 高熱を発する医療機器、火気等に接触させないこと。
- 2) 本品を医療従事者以外が使用する場合は、必ず医療従事者の指導、指示を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

＜有効期間＞

本品の包装に記載されている使用期限[自社データによる]までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者及び製造業者＞

株式会社 ララ

＜販売業者＞

株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間 9:00～17:00 (月～金 ※祝日を除く)