

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

イワツキドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

・本品は不織布製のドレープである。使用部位や手術手技に応じて、寸法、形状、開窓部の有無等が異なる。また粘着テープを有したのものもある。

<滅菌方法>

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布の用具である。本品は患者を手術中の熱、炎又は他のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。

<使用方法>

1. 本品を包装袋外側と接触しないように取り出す。
2. 本品で患者身体の適切な部位を覆う。
3. 手技が終了したら本品を外し廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 使用前に必ず滅菌包装に破れ等の損傷又は水ぬれがないことを確認する。損傷や水ぬれがあれば使用しないこと。
- 2) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、廃棄すること。
- 3) 粘着材を使用している製品については、個人差により皮膚刺激性が発生する場合がある。患者の皮膚に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

<その他の注意>

- 1) 高熱を発生する医療機器、火気等に接触させないこと。
- 2) 本品を医療従事者以外が使用する場合は、必ず医療従事者の指導、指示を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等を避けて安定した状態で保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

<有効期間>

本品の包装に記載されている使用期限[自社データによる]までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者及び製造業者>

株式会社 ララ

【販売業者】

イワツキ株式会社

東京都板橋区志村1丁目32番18号

問い合わせ先: TEL 03-3966-8371