

医療用品4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

SkyWalker滅菌済ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

他社製品(指定製品以外)及び専用以外の器械器具との併用
(相互作用の項参照)


<使用方法>

再使用・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

本品はSkyWalker ロボット支援手術システム(別品目)のロボティックアームに取り付け、ロボティックアームの患者への直接接触防止のため、保護的なカバーとして使用される滅菌済みドレープである。単回使用である。

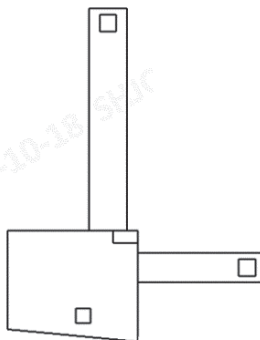

【使用目的又は効果】

本品は術野、器具又は装置を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

手術前、SkyWalker ロボット支援手術システム(別品目)のロボティックアームに本品を覆い被せる。

手術終了後、取り外す。

※詳細な使用方法については、必ず手術手技書を参照すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品および包装材料に損傷が認められる場合は使用しないこと。

2. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	相互作用
他社製品 (指定製品以外)	本品は他社製品との適合性が確認されておらず、正常に機能しないおそれがあるため、組み合わせて使用しないこと。

3. 不具合・有害事象

重大な有害事象

(その他の不具合)

機器の不適切な使用による破損、変形
上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

2年(使用期限は外箱ラベルに記載)

【主要文献及び文献請求先】

マイクロボート・オーソペディックス・ジャパン株式会社
TEL 03-6758-7262

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

マイクロボート・オーソペディックス・ジャパン株式会社
TEL 03-6758-7262

製造業者:

Shandong Kangli Medical Equipment Technology Co., Ltd.(中国)