

真癒鉱泉 α

【禁忌・禁止】

- 電子レンジやオープンでの加熱は絶対にしないこと。
[火災の原因等になることがあります]
- 加熱温度は 65℃以下とすること。
[やけどの原因となります]

【形状・構造及び原理等】

- 概要
基材となるシリコンゴムに 6 種の自然鉱石パウダーを練り込んだものである。加熱装置を用いて温水、温風等により加熱して使用する。
また、全身に用いるときは、入浴時、浴槽に入れて使用する。
- 構造、外観



名称	配合量
シリコンゴム	85%
鉱石パウダー	15%

3. 原理

加熱装置を用いて温水、温風などにより本製品を加熱すると、本製品に練り込まれた加熱媒体（鉱石）が加熱され、本製品が発熱する。発熱した本製品を患部に当てることにより消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。

4. 寸法・質量

縦	横	厚さ	質量
35cm	35cm	1.5cm	2.0kg

【使用目的又は効果】

本製品を加熱装置で加熱し、発熱した本製品を患部に当て、消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。本製品は再使用可能である。

<効果>

- ・疲労回復
- ・血行をよくする
- ・筋肉の疲れをとる
- ・筋肉のこりをほぐす
- ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- ・胃腸の働きを活発にする

【使用方法】

- 温水、温風等で 10～20 分本製品を加熱する。
- 本製品を患部に当て、温度が維持されている間、患部を消炎鎮痛処置（温熱治療）する（腰部、腹部、臀部、肩部他）
- お湯で満たした浴槽中に本製品を入れ、その上に全身を置き、遠赤外線の輻射熱により全身を温める。

【使用上の注意】

- 使用中異常を感じた場合は使用を中止すること。
- 本製品の近くでストーブ等を使わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・直射日光や、冷暖房機器の強風などが直接当たる場所は避けること。変形・変色の原因となります。
- ・汚れた場合は中性洗剤とスポンジで汚れを落とすこと。

<有効期間> 10 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ライフサイエンスプロジェクト
群馬県渋川市八木原 951 番地
TEL 0279-24-4060
Email info@lifescience-project.jp

製造業者 株式会社ライフサイエンスプロジェクト