

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 (救急絆創膏)
JMDN コード 34654000 (34864000)

シリコーン創傷保護パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止。
再滅菌禁止。
シリコーンゲルにアレルギーのある方は使用を避けること。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品には、ハイタイプ、モデレートタイプ、マイルドタイプの3つのタイプがあります。

ハイタイプとモデレートタイプは、防水性、通気性を有する柔らかいポリウレタンフィルム、製品除去時の痛みを軽減する柔らかいシリコーンゲル、滲出液を吸収することができる液体吸収層、および剥離フィルムから構成されます。

マイルドタイプは、防水性、通気性を有する柔らかいポリウレタンフィルム、製品除去時の痛みを軽減する柔らかいシリコーンゲル、および剥離フィルムから構成されます。

本品は、滅菌済みです。

2. 形状、構造、材質

	形状	構造	材質
ハイタイプ		1: ポリウレタンフィルム層	ポリウレタン
		2: 液体吸収層 2.1: 高吸水性繊維層 2.2: 不織布拡散層	ビスコース ポリエステル ポリオレフィン ポリアクリレート
		3: シリコーンゲル層	シリコーンゲル ポリウレタン ポリアクリレート
		4: 剥離フィルム層	ポリエチレン
モデレートタイプ		1: ポリウレタンフィルム層	ポリウレタン
		2: 液体吸収層	ビスコース ポリエステル ポリエチレン
		3: シリコーンゲル層	シリコーンゲル ポリウレタン
		4: 剥離フィルム層	ポリエチレン
マイルドタイプ		1: 本体層	ポリウレタンフィルム 不織布 シリコーンゲル
		2: 剥離フィルム層	ポリエチレンフィルム または ポリプロピレンフィルム

3. 型式、サイズ

タイプ	外形サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入り数 (袋/箱)	入り数 (枚/袋)
ハイタイプ High	7.5x5	5x2.5	10	1
	7x6	4x3	10	1
	8x6	5x3	10	1
	9x6	4.5x3	10	1
	10x5	6x2.5	10	1
	10x8	6x5	10	1
	10x9	6x4.5	10	1
モデレートタイプ Moderate	7.5x5	4x2.5	10	1
	10x7.5	6x4	10	1
	10x9	6x5	10	1
	10x10	6x6	10	1
マイルドタイプ Mild	5x4	-	10	1
	6x5	-	10	1
	7.5x5	-	10	1
	10x5	-	10	1
	10x7.5	-	10	1
	10x10	-	10	1

製品 1 枚入りの袋 (パウチ) と、それが 10 袋 (パウチ) 入りの箱の製品があります。

4. 原理

シリコーンゲルは固定の役割を果たすことができ、傷口は本品のコアにある防水ポリウレタンフィルムと液体吸収層によって覆われ保護されます。

シリコーンゲルは穏やかな粘着性を持ち、本品交換や本品除去による痛みや二次的外傷を軽減します。傷口の滲出液は液体吸収層で吸収できます。

【使用目的又は効果】

本品は、傷口や術後創傷のために用いる被覆・保護材です。

【使用方法等】

- 傷口を流水で洗い流して清潔にし、乾燥させる。(図1)
- 適切なサイズの本品を選び、剥離フィルムをはがす。(図2)
- 傷口に本品を貼る。(図3)

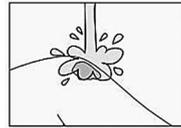


図1

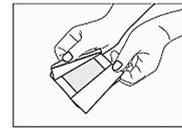


図2



図3

【使用上の注意】

- 使用中に、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合には、本品の使用を中止し、医師又は薬剤師に相談し、適切な処置を受けること。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 本品の成分又は材料に対する過敏症が既知の患者又は使用者には使用しないこと。
- 再使用しないこと。再使用した場合、製品の性能が低下したり、クロスコンタミネーションが起こる可能性があります。
- 無菌であること。使用前に滅菌包装が破損または開封された場合は使用しないこと。再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
指定された温度範囲内で、清潔で乾燥した場所に保管すること。日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

製造日から5年間(自己認証データによる)
廃棄の際は、地域の環境手順に従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ライフテクノロジー
URL <http://life-tech.co.jp>
電話番号：03-5422-9767

製造業者：Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
(中華人民共和国)
URL <http://foryomedical.com/>

取扱説明書を必ず参照すること