

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ(JMDNコード : 16779000)

再使用禁止

BJチューブ

【禁忌・禁止】

- 1. 再使用禁止
- 2. 再滅菌禁止

- 本製品の使用目的以外には使用しない事。
- 本製品及び付属品の二次加工は絶対に行わない事。
- 本製品の使用にあたり、必ず本添付文書及び同時に使用する機器の添付文書を熟読し、その内容を充分理解しその指示に従って使用する事。

※【使用方法】

- 1. 使用直前に梱包から吸引チューブを取り出す。
- 2. 吸引器、回収容器にしっかりと接続する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1. あらかじめ接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。
- 2. 使用中は定期的に緩みハズレがないこと。
- 3. チューブがおりまげられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1. 重要な基本的注意
 - 1) 再使用禁止(本製品はディスポーザブル製品である。)
 - 2) 梱包の破線したもの、開封済みのものまたは水漏れしたものは使用しないこと。
 - 3) 廃棄する際は医療廃棄物として適切に処理すること。

※【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵・保管にあたっては、水漏れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて室温で保管すること。
- 2) 使用期限は製造年月日より3年(自己認証による)

※【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
リードメディカルサイエンス株式会社
〒113-0034
東京都文京区湯島2-14-4
お問い合わせ窓口「お客様相談室」
電話番号:03-5826-4015

外国製造所
国 名 : Germany(ドイツ)
製造業者 : Human Med AG(ヒューマンメッド社)

※【形状、構造及び原理】

- 1. 原材料／材質 : ポリ塩化ビニル (DEHPを含まず)、ナイロンステンレスパイプ(クロム・ニッケルを含有)
- 2. 形状・構造



サイズ : 全長 370cm 内径 : 1.2cm

3. 原理

吸引器より吸引された血液、体液、分泌液、滲出液、骨片などが本品を介して回収容器に送られる。

※【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。