

機械器具(50) 開創又は開孔用器具

一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

リード喉頭鏡

【警告】

- 患者の歯を、てこの支点として操作しない事。(歯を損傷する事がある為)
- 変形、部品の緩み等が無い事を確認した上で、使用する事。
- 有資格者以外は、使用しない事。

【禁忌・禁止】

- 清潔な状態ではないものは、使用しない事。
- 超音波洗浄機は、使用しない事。

【形状・構造及び原理等】


原理

本品は、患者の口に挿入する。舌を押し動かし、声門の視野を確保する為に、喉頭蓋谷に挿入し持ち上げる。又は、喉頭蓋にかぶせる。

ブレードをハンドルに装着することにより、ハンドル上部の電球が点灯し、ファイバーを通してブレードの先端を照明する。


形状・構造

マッキントシュF.O.

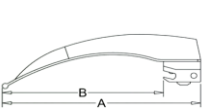


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-001-00	0	82	57
810-001-01	1	93	68
810-001-02	2	115	90
810-001-03	3	135	110
810-001-03C	3	135	110
810-001-04	4	155	130
810-001-05	5	176	151

ミラーF.O.

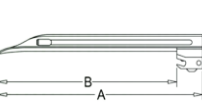


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-011-00	0	80	55
810-011-01	1	100	75
810-011-02	2	152	127
810-011-03	3	192	167
810-011-04	4	207	182
810-011-05	00	65	40

マッキントシュ

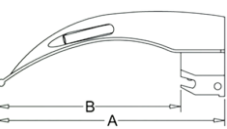


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-021-00	0	80	55
810-021-01	1	92	67
810-021-02	2	100	75
810-021-02L	2	112	87
810-021-03	3	130	105
810-021-04	4	155	130
810-021-05	5	175	150

ミラー

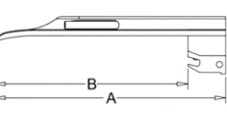

品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-031-00	0	78	53
810-031-01	1	102	77
810-031-02	2	155	130
810-031-03	3	195	170
810-031-04	4	205	180
810-031-05	00	65	40

ウィスコンシン

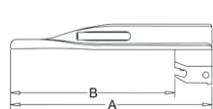


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-041-00	0	76	51
810-041-01	1	102	77
810-041-02	2	135	110
810-041-03	3	162	137
810-041-04	4	199	174

RFIVマッキントシュ




品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-051-02	2	100	75
810-051-03	3	130	105
810-051-04	4	155	130

IVマッキントシュ

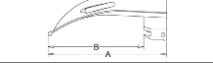

品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-061-02	2	100	75
810-061-03	3	130	105
810-061-04	4	155	130

F.O.マッキントシュ可動

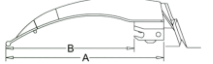


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-130-02	2	100	75
810-130-03	3	130	105
810-130-04	4	155	130

マッキントシュ可動




品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-120-02	2	100	75
810-120-03	3	130	105
810-120-04	4	155	130

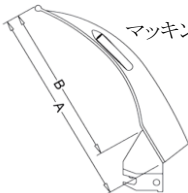

マッキントシュPOLIO


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-071-03	3	130	105

オックスフォード

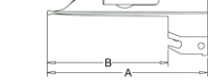

品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-081-04	1	102	77

スWORD

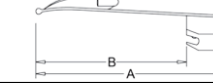


品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-091-01	1	105	80
810-091-02	2	130	105

ロバートショウ



品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-100-00	0	94	69
810-100-01	1	112	87

ポート付ミラー

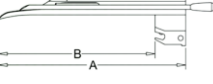

品番	Fig	A(mm)	B(mm)
810-110-00	0	78	53
810-110-01	1	102	77

ハンドル



① ② ③

番号	品番	名称
①	810-560-25	中 (Medium)
②	810-562-25	小 (Small)
③	810-568-25	スタビィ (Stubby)

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管(人の気道)への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具をいう。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。ハンドル、ブレードから成る。照明装置を内蔵するものもある。ただし「軟性挿管用喉頭鏡」、「硬性挿管用喉頭鏡」、「ビデオ軟性挿管用喉頭鏡」および「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡」に該当するものを除く。

【使用方法等】

1. ハンドル上部に、ブレード下部のフックを引っ掛ける。
2. ブレードをフックに引っ掛け、音がする迄ブレード先端方向に引く。
3. ブレード先端を上方向に上げ、ハンドルの電球スイッチを入れる。
4. 口腔内に挿入し、器具を挿管する部位を照明する。
5. 使用後は、取扱手順を逆にし、ハンドルとブレードを分離する。

〈使用前の確認事項〉

- ◆ 本品に、破損等による鋭いエッジや罵音が無い事を確認する。
- ◆ ハンドル上部の電球スイッチを押し、ライトが点灯する事を確認する。
- ◆ ブレードを取り付け、先端から光が出ている事を確認する。

【使用上の注意】

1. 本品使用時にブレードの先端による、喉頭蓋、声帯等の損傷。
2. 同じく、歯の損傷。
3. 長時間の使用に伴う、発熱による熱傷。
4. 口腔内挿管時の、器具の損傷。
5. ハンドルにブレードを取付ける際、音が鳴る迄固定動作を行う事。
6. 手術・治療等、医療行為以外には、使用しない。
7. 手技について、充分なトレーニングを実施しておく事。
8. 損傷及び、破損の恐れがあるので、丁寧に扱う。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵保管にあたっては高温、多湿、ほこり等に注意し、直射日光の当たる場所を避け、常温で清潔な場所で保管する事

【保守・点検に係る事項】


1. 使用後は、血液、体液、組織等の付着物を速やかに除去する
2. 洗浄には、塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗剤や、消毒剤及びホルマリン等は、機器を腐食させる可能性があるので使用しない。
3. 金属たわし、研磨剤等機器表面を損傷させるので使用しない。
4. 必要以上の力を加えない。
5. 損傷を与える様な他の機器類との接触を避ける。
6. 滅菌を行う場合は以下の条件で行う事

オートクレーブ: 134℃/5min



エチレンオキシド: 可能

プラズマ滅菌装置: 可能

- ✓ ハンドルの滅菌を行う場合には、バッテリー(電池)及び電球を取外して下さい。(取外さない場合、思わぬ事故の原因となります)
- ✓ 滅菌を行う場合、御使用になります滅菌器の添付文書(使用説明書)等に従いご使用下さい。

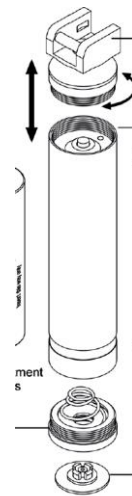

ハンドルのランプと、バッテリーは、図の様に取外して下さい。

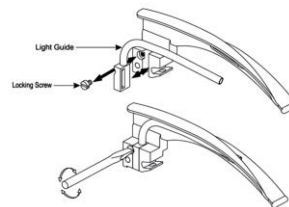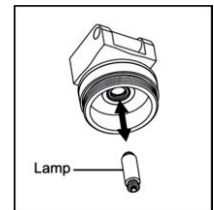

各ブレードのファイバー交換は、図の様に取外して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: リードメディカルサイエンス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-4

電話: 03-5826-4015 FAX: 03-5826-4019

製造業者: Tecno Instruments (Pvt.) Ltd. (テクノインストルメンツ社)

Pakistan (パキスタン)