

医04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

# ハイメンカ

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【包装】

パッケージに内容物の重量を記載。  
5g, 50g, 60g, 100g, 250g, 500g, 1kg

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。  
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、  
液体の吸収を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 龍宮株式会社

福岡県うきは市吉井町新治278

TEL0943-75-3148

製造業者

龍宮株式会社

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収し  
たりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成  
る材料をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない  
清潔な場所に保管すること。

開封後は速やかに使用すること。