

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

プロフィラキシス ターボパウダー

【禁忌・禁止】

- 1) 本材又は本材中の成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 呼吸器疾患の患者には使用しないこと。
- 3) 重篤な消化器官潰瘍のある患者には使用しないこと。
- 4) 心機能障害、肺機能障害のある患者には使用しないこと。
- 5) 慢性の気管支炎、喘息、上気道感染症、その他呼吸疾患のある患者には使用しないこと。
- 6) 口腔内に傷や出血、炎症等の異常が認められる患者には使用しないこと。
- 7) 口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形状：白い粉末

成分：炭酸水素ナトリウム、香料風味：レモン味

最大粒子径：150 μm

〔原理〕

歯面清掃器内のタンクに本材を補充し、清掃器のハンドピースのチップ先端より、本材を水と共に噴出させて、歯面に当て、歯面から歯垢や着色物等を除去して清掃する。

【使用目的又は効果】

電動式歯面清掃用装置と併用して、歯面の清掃に用いる。

【使用方法等】

本品は、本品製造販売元リンカイ株式会社の取り扱う Mectron S.p.A. 純正の電動式歯面清掃用装置等とのみ併用可能である。必ず併用する歯面清掃用装置の取扱説明書及び添付文書を熟読後に本材を使用すること。

1. 使用前にボトルをよく振る。
2. 本品ボトルのキャップを外し、キャップ内側のラインを用いて本材を量る。
3. 電源を切った電動式歯面清掃用装置のパウダー容器部に本材を入れて、蓋を閉める。
4. 装置の取扱説明書に従って歯面を清掃する。
5. 清掃後は、患者にうがいさせる等、口腔内を速やかに水洗する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本材は、吸湿により固まる恐れがあるため、湿気に晒さないこと。
- 2) 使用後はボトルの蓋を硬く閉めること。
- 3) ダマを防ぎ、均一にするため、使用前にボトルを必ず振ること。
- 4) コンタクトレンズ使用の患者には、本品使用の施術前にコンタクトレンズを外させること。
- 5) 患者、施術者ともに保護眼鏡の使用推奨。施術者及び施術助手はマスクをすること。
- 6) 損傷のおそれがあるため、本材を含んだエアや水を、コンボジット、充填材、ブリッジに直接当てないこと。
- 7) 本材を含んだ空気や水流を、軟組織や歯肉溝に直接当てないこと。
- 8) 施術前に患者の唇にワセリンを塗り、唇を保護すること。
- 9) 本材を使用して歯面清掃を行った後3時間は、紅茶やコーヒーなど歯の変色の原因になる飲料や喫煙を避けるよう患者に伝えること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者又は術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 2) 本材又は本材中の成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある術者は使用しないこと。
- 3) 本材が目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 4) 口腔軟組織や皮膚に付着した場合は、綿球等で拭いた後、大量の水で洗浄すること。
- 5) 本材噴射時は、口腔内のバキュームを同時に行うこと。

〔その他の注意〕

配管の詰まり防止のため、歯面清掃用装置、バキュームホース、排唾管及び分離器等、併用の機器の定期的な清掃、メンテナンスを行うこと。

〔保管方法〕

本材は、直射日光、高温多湿、水濡れ、酸、熱源を避け、容器の蓋を硬く閉めて保管すること。

〔有効期間〕

本材の使用期限は包装に記載のとおり。（製造日より3年）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： **リンカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地信濃町外苑ビル3階
電 話：03（3359）4321

製 造 業 者：Mectron S.p.A.

製 造 国：イタリア