

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

モノアート デンタルロール

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：円柱状

寸法：長さは、全タイプ共通で 37mm

直径は、8mm / 10mm / 12mm の 3 タイプ

構造：綿繊維を巻き、ロール状に成形したもの

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料

【使用方法等】

1. 滅菌消毒したピンセット等を用いて本品 1 個を摘まむ。
2. 口腔内の防湿したい部位又は体液のある部位に、本品を直接置く。
3. 必要に応じ、清潔な手袋をした指で軽く圧接する。

【使用上の注意】

1. 本品は使い捨て品のため、再使用しないこと。
2. 包装開封後は、滅菌済みピンセット等を用いて本品を蓋付きの容器に移し、なるべく早く使い切ること。
3. 包装が開封または破損している場合は、使用しないこと。
4. 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

水分、高温及び直射日光を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：**リウカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地 信濃町外苑ビル 3 階

電 話：03 (3359) 4321

製 造 者：Euronda Spa

製 造 国：イタリア