

歯科材料 7 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

## プロアート SP ワックス

### 【形状・構造及び原理等】

形 状：固形ろう(円盤形) 45g / 円盤型 アルミ缶入り  
色 調：ベージュ、ブルー、ブラウン、グリーン、グレー、  
レッド、バイオレット、ベージュブラウンの8色  
主 成 分：ハイドロカーボンワックス、カルナバワックス  
原 理：支台歯上に盛りつけた本品を歯の形状に削り、埋没材  
埋没焼成する。熱で本品が溶けたことによりできた  
埋没材内の空洞を利用して合金を鑄造する。

### 【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作成用キャストイングワックス

### 【使用方法等】

1. 蓋を開け、本材成分が分離していないか確認する。
2. 支台歯等のワックス対象物に分離材を塗布してから、本材を築盛する。
3. 形態作成後、ワックススプルー等を使用して、通法に従い鑄造を行う。

### 【使用上の注意】

1. ワックスにアレルギーの既往歴がある術者は、保護手袋等を着用して本材を使用すること。
2. 本材は可燃性である。本材の滴の付着には気をつけ、火傷等しないように注意すること。
3. 気体になった本材を吸入しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光、紫外線及び高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 氷点下に置くと劣化して砕けやすくなるため、注意すること。
- 3) 本品は火気厳禁である。火や熱源の近くに本品を置かないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リウカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地 信濃町外苑ビル 3 階  
電 話：03 (3359) 4321

製 造 業 者：Ivoclar Vivadent Inc.

製 造 国：アメリカ