


機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 31776000

## リンカイ マウスミラー

### 【形状、構造及び原理等】

[形状]

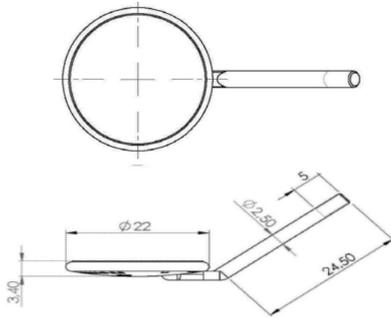

[寸法] ミラー部直径：2.2cm ミラー部の厚さ：3.4mm  
柄の長さ：2.5cm 柄の直径：2.5mm

[主原料] 本体：ステンレス、ガラス 背面：アルミニウム

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド

### 【使用方法等】

本品のねじ切り部を市販のミラーホルダーに装着し、ホルダーを手指で持って、本品を患者の口腔内に入れ、鏡面に口腔内を映して、目視にて診断を行う。必要に応じ背面又は鏡面にて圧排を行う。患者ごとに毎回使用後、ホルダーから本品を取り外す。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄し、下記条件又は医療機関により確認され検証された滅菌条件において滅菌して使用すること。  
滅菌方法：オートクレーブ等 滅菌条件：温度 134°C
- 2) 使用後は直ちに洗浄、消毒、滅菌を行うこと。血液、体液、組織片等付着した汚染物質をそのままにしておくと、除去しにくくなるので注意すること。
- 3) 本品の素材であるステンレス鋼は、鉄などに比べ錆びにくい性質ではあるが、使用方法や環境によっては、腐食（錆び）する可能性があるため注意すること。
- 4) 使用による消耗によって形態が変わった本品は使用しないこと。また本品に劣化や異常が見られた場合は使用を止めること。

### 【洗浄、消毒、滅菌に関する注意】

- 1) 一回使用ごとに、防錆洗浄液か精製水を用いて洗浄し、本品に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- 2) 水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する可能性があるため注意すること。
- 3) 洗浄後に汚れが残った状態で本品を消毒あるいは滅菌すると、錆が生じる場合があるため注意すること。
- 4) 次の薬剤は、腐食の恐れがあるため、使用しないこと。  
次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザイルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、ポビドンヨード、ホルマリンフェノール
- 5) 家庭用洗剤は、腐食の恐れがあるため、本品に使用しないこと。
- 6) 超酸化水等は、腐食の恐れがあるため、本品に使用しないこと。
- 7) 腐食の原因になるため、本品洗浄の際は、磨き粉、金属ワール、金属ブラシ等を使用を避けること。
- 8) 本品を洗浄装置（超音波洗浄器等）で刃物と一緒に洗浄する際は、刃に本品が接触しないように注意すること。
- 9) 本品の薬剤消毒を行う際、薬剤の添付文書に記載の用法・用量を守ること。
- 10) 本品の消毒、滅菌には精製水を使用すること。

- 11) 洗浄、消毒、滅菌後は、直ちに水分を完全に除去し、必ず乾燥させてから本品を保管すること。腐食の原因になるため、水分が付着したまま本品を放置あるいは長時間保管しないこと。
- 12) 加熱滅菌器（オートクレーブ等）の乾燥温度に注意すること。過度に高温の乾燥は、本品の変質又は変色の原因となるので注意すること。
- 13) 加熱不飽和ガス滅菌器、化学性のガスを用いたオートクレーブ滅菌器等は、本品腐食の恐れがあるため使用しないこと。
- 14) プラズマ滅菌は本品の素材に影響を及ぼすため、使用しないこと。

### 【重要な基本的注意】

- 1) 本品が、漂白剤、消毒液等の塩素あるいはヨウ素を含む溶液に曝された場合は、直ちに精製水で洗浄すること。
- 2) 本品を無理な角度から加圧したり、本品に過度の圧力をかけないこと。
- 3) 本品を落とさないこと。
- 4) 本品変形の原因になるため、本品をトレーやコンテナに入れて移動あるいは保管する際は、丁寧に扱うこと。
- 5) 本品の切削、刻印、曲げ等の改造は、破折等の原因になるため、絶対に行わないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- 1) 常温常湿の清潔な場所で保管すること。
- 2) 滅菌済みの本品を保管する際は、滅菌の有効保管期間を管理すること。
- 3) 電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- 4) もらい錆を防ぐため、次のことを守ること。
  - ・錆びている器具と一緒に保管しないこと。
  - ・化学薬品と一緒に保管しないこと。
  - ・消毒器・滅菌器保管庫等の内部に発生した錆や汚れに注意すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：リンカイ株式会社

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階  
電 話：03 (3359) 4321

外国製造業者：Prodont-Holliger S.A.S.

製 造 国：フランス