

歯科材料 7 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス 70893000

## クリンデント パラフィンワックス

### 【形状・構造及び原理等】

形状：長方形の薄い板状

寸法：縦 75mm × 横 145mm  
厚さ 1.0mm

色調：ピンク

主成分：パラフィン、蜜ろう、カルナバ

### 【使用目的又は効果】

蠟義歯の製作又は咬合採得に用いる。

### 【使用方法等】

#### 〔義歯の仮床〕

1. 本品を模型の大きさに合わせて切る。
2. 本品を火炎等で適度に軟化させ、模型に圧接する。
3. 必要に応じ、過不足部分を足すか削り、形状を整える。

#### 〔人工歯の排列〕

1. 本品を火炎等で適度に軟化させ、ロール状に巻いて棒状にする。
2. 棒状にした本品を馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
3. 必要に応じ、過不足部分を足すか削って形状を整え、咬合堤を作成する。
4. 通法に従い、人工歯を排列する。

#### 〔咬合採得〕

1. 本品を均等に軟化させたものを患者に噛ませ、硬化後に取り外す。
2. その上に石こうを流し、石こう型として咬合状態を見る。

### 【使用上の注意】

1. 本品は可燃性であるため、使用時は火傷をしないよう注意すること。
2. 咬合採得時、過熱による火傷に注意すること。
3. 本品の使用場所には消火装置を備えること。
4. 本品使用時には十分な換気を行うこと。
5. 過度の加熱及び加熱したままでの放置はしないこと。
6. 他の製品と混用しないこと。
7. 溶解された本材を直接人体に使用しないこと。
8. 使用後に固まった本材を再溶解すると、成分変化や変質のおそれがあるため、再利用、再溶解しないこと。
9. 採得した咬合床は、血液・唾液などを洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。

### 〔重要な基本的注意〕

- 1) 本品使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 2) 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした時は、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- 3) 本品が、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

1. 可燃性があるため、本品の保管場所は火気厳禁とし、一つの保管場所に多量に保管しないようにすること。
2. 熱と火気を避け、高温になる場所（ストーブ等暖房器具の側、直射日光の当たる場所、炎天下の車中等）に置かないこと。
3. 保管場所には、消火装置を備えること。
4. 室温にて保管すること。

〔使用期限〕 1年半

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：リニカテ株式会社

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地  
信濃町外苑ビル 3 階

電 話：03(3359)4321

販 売 元：ケーオーデンタル株式会社

住 所：東京都杉並区松庵 1-18-13

製 造 元：LIANG LINN Enterprise CO.,LTD

製 造 国：台湾