

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

ジンジテック

【形状、構造及び原理等】

	形状	材質形状	容量
基 材	ダブルカートリッジ	ペースト（ファイバーピンク）	25mL
硬化材	50mL	ペースト（透明）	25mL

主成分
基 材：ハイドロメチルポリメチルシロキサン
硬化材：ビニルポリシロキサン

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる高分子シリコン材料。石膏模型の歯肉部分の窪みに本材を注入充填して硬化させることにより、模型上の歯肉部分を歯肉色にて回復し、歯科技工補綴物の審美的回復用ガイドとする。

【使用方法等】

- ①ダブルカートリッジをミキシングガン(1:1)にセットする。
- ②先端のダブルカートリッジ保護用キャップを取り外す。
- ③ミキシングチップを取り付ける前に少し練り出し、本材が1:1で均等に出てくるか確認する。確認後ミキシングチップをカートリッジに取り付け、必要な部分に本材を注入する。

- [注入方法]
- ④石膏模型の歯肉部分をカーバイトバー等で切削し、本材が流れ込むスペースを確保する。
 - ⑤歯科複模型用ゴム質弾性印象材料で切削した部分を覆うようにコアを取る。
 - ⑥コアに注入口と排出口を作る。
 - ⑦製作したコアに本材を注入する。（縮合型のシリコーン材と組み合わせで使用する場合は、分離材は不要。）
 - ⑧操作時間：1分／最終硬化時間：6分
硬化後は、模型から取り外す際は、注意すること。必要に応じて、形態をバー等で切削し整える。

【使用上の注意】

- 1) ゴム手袋を着用して本材を触ると、硬化不足を起こすおそれがあるため、ニトリル又はビニール手袋を着用して使用すること。
- 2) ハンドクリームの付いた手で本材を使用すると、硬化不良を起こす恐れがあるため、注意すること。
- 3) 目に入った場合は、多量の水で洗い流し、眼科医の診断を受けること。
- 4) 本材を破棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び高温多湿を避けて常温保管すること。
- ・有効期間 2年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： **リンカイ株式会社**
住 所：東京都新宿区南元町19番地信濃町外苑ビル3階
電 話：03（3359）4321

製 造 業 者：Ivoclar Vivadent Inc.
製 造 国：アメリカ