

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 16189000

リンカイ スブルーワックス

【形状、構造及び原理等】

形 状：線状ワックスが円柱状のプラスチックの芯に巻かれ
ロール 状になっているワックス。



# 1：ソフト（青）／# 2：ハード（濃紺）	直径は、ソフト／ハード共通
直径：2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm	

色 調：ソフト（青）、ハード（濃紺）

主原料：パラフィン、マイクロクリスタリン

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型製作時にス
ブルー線として用いるキャストリングワックス。

【使用方法等】

コイル状のワックスを使用する長さにカットして、通法に従い
使用する。円錐台固定部分、コーピング、フレーム固定部分は
移行的でスムーズな面に仕上げる。

〔使用方法に関する注意〕

- 1) カットする時に本品を引っ張らないように注意してください。
本品の太さが変化する恐れがあります。
- 2) 鋳造リング、円錐台に固定する場合は、ユーティリティワッ
クスをご使用ください。
- 3) 本材をコーピング等と繋ぐ場合は、必要に応じスティッキー
ワックス、インレーワックスを併用してください。

【使用上の注意】

- 1) 本材を使用する場所には、局所排気装置や換気扇等を設け
ること。密閉した部屋で本品を使用しないこと。
- 2) 本材使用時には、保護マスクを着用して、鋳造により発生
する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- 3) 本品使用時に着用していた衣服から粉塵を除去または清掃
する時は、空気の吹きつけ法ではなく、機械的吸引法を用
いること。
- 4) 本材は、【使用方法等】欄に記載の用途以外の使用はしない
こと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び多湿を避けて、保管すること。
2. 火気厳禁。火や熱源の近く、高温となる可能性のある場所に
置かないこと。
3. 保管場所には消火装置を備え、1カ所の保管場所に大量に
保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リンカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階

電 話：03（3359）4321

製 造 業 者：LiangLinn Enterprise Co.,Ltd.

製 造 国：台湾