

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス 70893000

リンカイ パラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】

形 状：長方形の薄い板状

寸 法：縦 75mm × 横 145mm
厚さ 1.0mm

色 調：ピンク

主成分：パラフィン、蜜ろう、カルナバ

【使用目的又は効果】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いるワックス

【使用方法等】

〔義歯の仮床〕

1. 本品を模型の大きさに合わせて切る。
2. 本品を火炎等で適度に軟化させ、模型に圧接する。
3. 必要に応じ、過不足部分を足すか削り、形状を整える。

〔人工歯の排列〕

1. 本品を火炎等で適度に軟化させ、ロール状に巻いて棒状にする。
2. 棒状にした本品を馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
3. 必要に応じ、過不足部分を足すか削って形状を整え、咬合堤を作成する。
4. 通法に従い、人工歯を排列する。

〔咬合採得〕

1. 本品を均等に軟化させたものを患者に噛ませ、硬化後に取り外す。
2. その上に石こうを流し、石こう型として咬合状態を見る。

【使用上の注意】

1. 本品は可燃性であるため、使用時は火傷をしないよう注意すること。
2. 咬合採得時、過熱による火傷に注意すること。
3. 本品の使用場所には消火装置を備えること。
4. 本品使用時には十分な換気を行うこと。
5. 過度の加熱及び加熱したままでの放置はしないこと。
6. 他の製品と混用しないこと。
7. 溶解された本材を直接人体に使用しないこと。
8. 使用後に固まった本材を再溶解すると、成分変化や変質のおそれがあるため、再利用、再溶解しないこと。
9. 採得した咬合床は、血液・唾液などを洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本品使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 2) 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした時は、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- 3) 本品が、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 可燃性があるため、本品の保管場所は火気厳禁とし、一つの保管場所に多量に保管しないようにすること。
2. 熱と火気を避け、高温になる場所（ストーブ等暖房器具の側、直射日光の当たる場所、炎天下の車中等）に置かないこと。
3. 保管場所には、消火装置を備えること。
4. 室温にて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：リンカイ株式会社

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地
信濃町外苑ビル 3 階

電 話：03(3359)4321

製 造 元：LIANG LINN Enterprise CO.,LTD

製 造 国：台 湾