

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 16189000

EZワックス

【形状、構造及び原理等】

形状：四角い小さなブロック状の固形ロウを12片結合し、板状にしたもの同色4枚（453グラム）／一箱。



#1	クラウンブリッジ	青	ハード
#2	インレー用	緑	ミディアム
#3	ディッピング用	赤	

色調：以下のとおり、青・緑・赤の三種がある。

- クラウンブリッジ・インレーワックス用：
青（ハードタイプ）／緑（ミディアムハードタイプ）
- ディッピング用：
赤（粘度があり、適度に伸びるタイプ）

主成分：パラフィン、カルナバロウ、蜜ろう

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストリングワックス。既成ワックスにない形状を本材で形成し、ろう型を使ってキャストリングし、金属に置き換える。

【使用方法等】

- 模型材の表面にワックス分離材等を塗布します。
- ワックス盛り上げ用のインスツルメント等を用いて、少量づつ適温で溶かした本材を盛り上げていきます。
- ワックス余剰部をエバンス彫刻刀等でトリミングしてください。
- 歯冠形態が完成した後、湯動用のスプルーを植立します。
- スプルー植立後、パターンをフォーマーにセットし、埋没します。

【使用上の注意】

- 本材は、可燃性のワックスであるため、使用時に火傷をしないよう注意すること。
- ワックスにアレルギー等の既往歴がある術者は、保護手袋を着用の上、使用すること。
- 本材を使用する時は、目の損傷を防ぐために、防護メガネ等を使用すること。
- 使用後に固まった本材を再溶解すると、本来の成分から変質するので、再利用は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 火気、熱、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保管すること。
- 本品は、可燃性があるため火気厳禁である。
- 同じ場所に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リンカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階

電 話：03 (3359) 4321

製 造 業 者：LiangLinn Enterprise Co,Ltd.

製 造 国：台湾