

歯科材料 3 義歯床材料

一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000

ブリーチング トレー材 ソフト

【形状、構造及び原理等】

形状：直径120mm、厚さ1.0mmの薄い円板型

色調：透明

原材料：エチレンビニルアセテート（EVA）

【使用目的又は効果】

個人トレー、ベースプレート等の作成に用いる熱可塑性レジン・シート

【使用方法等】

1. 加圧熱成型器のヒーターをよく温め、まず、スペーサー材を模型に打ち込む。
2. 形成されたスペーサー材のブリーチ予定部分を切り出し、模型に戻す。
3. 使用する成型器の取扱説明書及び添付文書に従い、スペーサー材の上から本品を加熱し、圧接する。
4. 加圧したまま放置し、本材が十分に冷めるまで自然冷却する。
5. 模型から本品を切り取り、通例に従って形態修正を行う。

【使用上の注意】

1. 加熱・放冷時間は、使用する成型器により異なる。成型器の取扱説明書及び添付文書を熟読の上、本材を使用すること。
2. 本材を炎に直接かざさないこと。
3. 一度でも加熱・加圧したことのある本材を利用すると精度を欠く製作物になるおそれがあるため、再利用しないこと。
4. 本材を切断する際は、よく熱したメス等を用い、表面が滑るため、十分に注意して切ること。
5. 本材を切り出し又は研磨する際は、保護メガネ等を着用し、目の損傷を防ぐこと。
6. 本材又は類似の成分に過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、そのような患者に対して、本材で作成した装具を使わないこと。
7. 本材の使用や皮膚接触により、眼、皮膚、呼吸器、口腔内外に炎症やアレルギーが発症した患者又は術者は、使用をすぐに中止し、専門医の診断を受けること。
8. 本材を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光及び多湿を避け、室温で保管すること。
- 2) 購入時の箱に入れて保管すること。

[有効期間]

包装に表示された日付までに使用すること。

（表示の使用期限は製造元による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：**リンカテ株式会社**

住所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階

電話：03（3359）4321

販売元：大榮歯科産業株式会社

住所：大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番17号

電話：06（6441）3332

製造業者：Dreve Dentamid GmbH

製造国：ドイツ