

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストワックス 16189000

プロアートワックス

【形状、構造及び原理等】

形状：固形ろう(円盤形)45g / 円盤アルミ缶入り
主成分：ハイドロカーボンワックス、カルナバワックス
色調及び用途：

用途	色
サービカル用	レッド
マージン用	ボルドー
ミリング用	グリーン、グレー
IPS Empress用	ベージュ

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストワックス。

【使用方法等】

各タイプの用途に従い、通法に従って使用する。基本的な使用法は、以下のとおり。

1. 蓋を開け、本材成分が分離していないか確認する。
2. 支台歯等のワックス対象物に分離材を塗布してから、本材を築盛する。
3. 形態作成後、ワックスプルー等を使用して、通法に従い鑄造を行う。

【使用上の注意】

- ① ワックスにアレルギーの既往歴がある術者は、保護手袋等を着用して本材を使用すること。
- ② 本材は可燃性である。本材の滴の付着には気をつけ、火傷等しないように注意すること。
- ③ 気体になった本材を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光、紫外線及び高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 氷点下に置くと劣化して砕けやすくなるため、注意すること。
- 3) 火気厳禁品である。火や熱源の近くに本品を置かないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リンカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地信濃町外苑ビル3階
電 話：03 (3359) 4321

製造業者：Ivoclar Vivadent Inc.

製造国：アメリカ