

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

セルフミキシングチップ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：

寸 法		接続部の色調	混合比
全長	ノズル内径		
約40mm	2.5mm	ブラウン	1:1



原材料：ポリエチレン、PVC

構 造：内部に羽状構造を有するノズル部と接続部から成る。

原 理：本品を歯科材料入りダブルシリンジ等の先に取り付け、プランジャーを押すと、二材の歯科用材料が羽付きノズル内のを通過することにより、十分に攪拌され練和されて押し出される。

【保管方法及び有効期間等】

熱、火気及び直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リンカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階

電 話：03 (3359) 4321

製 造 業 者：Reliance Orthodontics Products, Inc.

製 造 国：アメリカ

【使用目的又は効果】

歯科用材料を攪拌・練和する機能を有する押出用ノズル

【使用方法等】

[取り付け方法]

1. 歯科用材料入りダブルシリンジ等のキャップを取り外す。
2. 本品接続部の V 型切込みをカートリッジ等の V 型切込みに合わせて、本品を押込む。本品接続部を時計回りに 90° 回転させると、本品はロックされる。
3. シリンジのプランジャー等を押して力を加えると、二材の材料が本品ノズル内で練和されて押し出しされる。
4. 使用後に本品を取り外さず、次回使用時まで付けたままにしておくことが可能である。ただし、本品内部に付着した材料が硬化開始するなど材料の出が悪くなった時や、繰り返し使用して本品が劣化した場合には、速やかに本品を取り外し、シリンジ等に当初装着されていた蓋をすること。

[取り外し方法]

本品接続部を時計回りと反対方向に 90° 回転させ、親指を本品上部にあて、親指と人差し指で本品を挟んで下方向に取り外す。一度でも取り外した本品は廃棄すること。

【使用方法に関する使用上の注意】

本品を取り付ける前に、蓋を外したシリンジ又はカートリッジ等の口から歯科材料を少量押し出して、シリンジ又はカートリッジ等の出口付近の材料が硬化していないこと、二材が均一に出ていること事前に確認してから本品を接続すること。

【使用上の注意】

併用する歯科材料、ダブルシリンジやダブルカートリッジ及びインジェクター（ミキシングガン）等は、メーカーによる添付文書や取扱説明書等に従って使用すること。