

機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

## Dreve ミキシングチップ

### 再使用禁止

#### 【形状、構造及び原理等】

##### 1. 形状



全長：39.7mm 内径：2.5mm




全長：88mm 内径：6.5mm



長さ：70mm 内径：4.2mm



長さ：64.2mm 内径：3.2mm

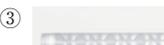

長さ：83mm 内径：5.4mm

##### 2. 構造

接続部及び内部に羽状構造を有するノズル部から成る。

##### 3. 原材料

ポリエチレン、PVC

##### 4. 原理

本品を歯科材料入りダブルカートリッジ等の先に取り付け歯科材料押出用ガン等を利用して力を加えると、二材の歯科用材料が羽付きノズル内を通過することにより、十分に攪拌され練和されて押し出される。

#### 【使用目的又は効果】

歯科用材料を攪拌・練和する機能を有する押出用ノズル

#### 【使用方法等】

##### [取り付け方法]

1. 歯科材料用インジェクター（ミキシングガン）等に材料入りダブルカートリッジ等をセットし、カートリッジのキャップを取り外す。
2. 本品接続部のV型切込みをカートリッジ等のV型切込みに合わせて、本品を押し込む。本品接続部を時計回りに90°回転させると、本品はロックされる。
3. インジェクター等のメーカーによる取扱説明書等に従いカートリッジ等に力を加えると、二材の材料が本品ノズル内で練和されて押し出される。
4. 使用後に本品を取り外さず、次回使用時まで付けたままにしておくことが可能である。ただし、本品内部に付着した材料が硬化開始するなど材料の出が悪くなった時や、繰り返し使用して本品が劣化した場合には、本品を取り外し、カートリッジ等に当初装着されていた蓋をすること。

##### [取り外し方法]

本品接続部を時計回りと反対方向に90°回転させ、親指を本品上部にあて、親指と人差し指で本品を挟んで下方向に取り外す。一度でも取り外した本品は廃棄すること。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 使用後、まだ中身の残っているカートリッジは、専用のキャップで蓋をせず、本品を取り付けたまま保管すること。ただし、併用の印象材等の添付文書又は取扱説明書等にこの場合に関する指示がある時は、それに従うこと。

- ② 本品取り付け前は毎回カートリッジより印象材のベース及びキャリストが均一に出るか事前に確認し、その後に本品を取り付けること。

#### 【使用上の注意】

1. 併用する印象材、デイスペンサー及びカートリッジは、メーカーによる添付文書、取扱説明書等に従って使用すること。
2. 使用後、一度カートリッジから取り外した本品は、必ず廃棄し、再使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 熱、火気及び直射日光を避けて保管すること。
- 2) 劣化のおそれがあるため、殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット等に保管しないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リウカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階  
電 話：03(3359)4321

製 造 業 者：Dreve Dentamid GmbH

製 造 国：ドイツ