

歯科材料 3 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000

ドゥルフオプラスト

【形状、構造及び原理等】

形状：①ハンドル付き円板型と②円板型の二種
寸法：①は直径120mm、②は直径120mmと125mmの二種
厚み：①3mm ②2mm
色調：①透明 ②ピンク
原材料：ポリスチレン

【使用目的又は効果】

個人トレー、ベースプレート等に用いる熱可塑性レジン・シート材

【使用方法等】

1. 加圧成型器に本品をセットする。
2. 熱成型前に模型を水で湿らせ、アンダーカット部をブロックアウトする。
3. 成型器の取扱説明書に従い、本品を加熱・加圧形成する。
4. 模型上に本品を圧接した後、加圧したまま放置して、自然冷却する。加熱時間、放冷時間は下表のとおり。
5. 形成器から本材を取り出してバリを除去し、必要に応じてカッターで形を整え、研削材等で切り口を滑らかにする。

併用機器での加熱時間及び放冷時間

	加熱時間	放冷時間
2mm材	1分35秒	1分30秒
3mm材	1分55秒	2分00秒

【併用する医療機器】

● 加圧成型器

(一般的名称：歯科技工用成型器 70750010)

- 1) 販売名：ドゥルフオマット スキャン
医療機器届出番号：13B2X00065000159
- 2) 販売名：ドゥルフオスマート
医療機器届出番号：13B2X00065000258
1) 2)共、製造販売業者：リンカイ株式会社
製造業者名：Dreve Dentamid GmbH

【使用上の注意】

1. 加熱/冷却時間は、本品の厚さや使用する成型器により異なる。成型器の取扱説明書及び添付文書を熟読の上、本品を使用すること。
2. 本品を炎に直接かざさないこと。
3. 一度でも加熱・加圧したことのある本品を利用すると精度を欠く製作物になるおそれがあるため、再利用しないこと。
4. 本材を切断する際は、よく熱したメス等を用い、表面が滑るため、十分に注意して切ること。
5. 本品を切り出し又は研磨する際は、保護メガネ等を着用し、目の損傷を防ぐこと。
6. 本品又は類似の成分に過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、そのような患者に対して、本品で作成した装具を使わないこと。
7. 本品の使用や皮膚接触により、眼、皮膚、呼吸器、口腔内外に炎症やアレルギーが発症した患者又は術者は、使用をすぐに中止し、専門医の診断を受けること。
8. 本品は、ベースプレートとして使用する場合、通常2～3回使用可能である。
9. 本材を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 直射日光及び多湿を避け、室温で保管すること。
- 2) 購入時の箱に入れて保管すること。

【有効期間】

包装に表示された日付までに使用すること。
(表示の使用期限は製造元による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リンカイ株式会社**

住所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階
電話：03 (3359) 4321

製造業者：Dreve Dentamid GmbH

製造国：ドイツ