

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

## ファースト&ファイナル

### 【禁忌・禁止】

本品又は本品に含まれる成分に対し、発疹や皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状: ペースト状  
一回分使用量 (2g) づつプラスチックカップ入

主成分: 炭酸カルシウム、シリカ、グリセリン

原理: 研磨材入りの本ペーストを回転器具の先に付け、回転させた歯磨カップ等を歯面に当てて研磨、清掃する。

### 【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。

### 【使用方法等】

1. 歯科用駆動装置及びハンドピース等を用い、その先端に接続した歯科用予防治療ブラシ(ポリッシングブラシ)、又は歯磨カップ(ラバーカップ)に、本材を付着させる。
2. 本材を付着させたブラシやカップを低速回転させ、注水下で歯面に当て、歯面を清掃・研磨する。
3. 清掃・研磨後は十分に水洗する。次段階の必要に応じ、水洗い後すぐに、コットンロール等を用いて、歯面への唾液等の侵入を防ぎます。

### 【使用上の注意】

- ① 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること
- ② 本品が眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ③ 本品を飲み込まないよう注意すること。
- ④ 本品が皮膚に付着した場合は、石鹸でよく洗浄すること。
- ⑤ 高速では使用せず、低い回転速度で使用すること。
- ⑥ 歯科用駆動装置及びハンドピース等については、メーカーの取扱説明書に従い、正しく使用すること。
- ⑦ ブラシ・カップ等はメーカーの取扱説明書に従って使用し、過度の加圧を避けて清掃・研磨を行うこと。
- ⑧ 十分な量のペーストを用いて研磨を行うこと。
- ⑨ 誤飲等を防ぐため、口腔内の唾液を適切に排出しながら清掃・研磨を行うこと。
- ⑩ 術者には保護眼鏡やグローブ等の着用をお勧めします。
- ⑪ 清掃及び研磨1回分の使用量が1カップに入っていますので、必ず毎回カップごと使い捨ててください。

### 【保管方法及び使用期間等】

[保管方法]

- ① 直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ② 有効期限を過ぎた本品を使用しないこと。

[有効期限] 製造年月日より2年間

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: リンカイ株式会社

住所: 東京都新宿区新元町19番地信濃町外苑ビル3階

製造業者名: Reliance Orthodontic Products, Inc.

製造国: アメリカ