

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

リニュー ポイント

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

軸とその先端の作業部から成る。形状は、下図のとおり。

作業部形状：砲弾型

作業部色調：黒

軸部形式 1：CA 用



作業部 軸（シャंक）

【構造】

軸の先端に、研磨材を含有するゴム製の作業部を有する。

【原材料】

作業部：シリコーン・ゴム

軸 部：ステンレス

【原理】

作業部が含有する研磨材により、対象を研磨する。

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分から成る歯科用研磨材。

【使用方法等】

使用する回転機器（歯科用電動式ハンドピース等）の取扱説明書・添付文書等に従い、本品の軸を回転機器に装着して本品を回転させ、作業部表面を対象に軽く断続的に押し付けて、その表面を研磨する。

最高回転数 20,000 rpm

【使用上の注意】

1. 回転機器の挿入口に、本品の軸を確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認してから使用すること。
2. 使用前に本品を回転させて、振れがないことを確認してから使用すること。
3. 使用中はポイントを連続的に移動させ局所的な加熱を避けること。
4. 【使用方法等】欄に指定した回転数を超えて使用しないこと。
5. 本品使用時には、保護めがね等を装着すること。また、局所吸塵装置やサージカルマスクを使用し、発生したエアロゾルや粉塵を吸入しないように注意すること。
6. 本品を口腔内で使用する場合は、適切に滅菌してから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
2. 水のかかるおそれのある場所や化学薬品の保管場所、塩分やイオウ等ガスの発生可能性のある場所に本品を置かないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リニカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地 信濃町外苑ビル 3 階

電 話：03 (3359) 4321

発 売 元：株式会社バイオデント

住 所：東京都荒川区西日暮里 2-33-19 YDM 日暮里ビル

製 造 業 者：Reliance Orthodontic Products, Inc.

製 造 国：アメリカ合衆国