

歯科材料 06 歯科用寒天印象材
一般医療機器 歯科複模型用寒天印象材 70890000

リーバン寒天印象材

【形状、構造及び原理等】＊

【概要】

歯科複模型用寒天印象材

【形状、構造】

常温でゲル状

成分：グリセリン・寒天

【原理】

80℃以上に加熱することでゲル化し、マスターモデルに密着させた後冷却することで、印象を採取することができる。

【使用目的、効能又は効果】

リン酸塩系埋没材を使用する場合の、歯科複模型用寒天印象材。

【品目仕様等】＊

80℃以上で完全溶解。

荒結晶状の過気泡・常温でのゲル化は除去する。

【操作方法又は使用方法等】

- 1). 本模型製作後水で湿らして寒天フラスコにセットする。
 - 2). 80℃程度で寒天を溶解し、寒天フラスコに流し込む。
 - 3). 完全硬化後本模型を取り出し、複模型を作成する。
- ※ 再使用の際や沸騰した場合は、減少した水分を補って溶解する。
- ※ 焦げた寒天は使用しない。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 1). 他の製品と混用しないこと
- 2). 複模型制作用寒天につき、口腔内での使用を絶対にしないこと。
- 3). 本材は歯科技工有資格者以外は使用せず、上記使用目的以外で使用しないこと。

【重要な基本的注意】

- 1). 本材を飲み込まないこと。万一飲み込んで異常が出た場合は、医師の診断を受けること。
- 2). 本材に対して発疹皮膚炎などの過敏症がある方は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には使用を中止し直に医師の診断を受けること。
- 3). 高温での使用となるため、火傷に注意すること。万が一、火傷を負った場合はすぐに流水で冷やし、重症の場合は医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】＊

【貯蔵・保管方法】

- 1). 重量物となるので大きな振動が起こる場所や、落下の危険性がある場所に置かないこと。
- 2). カビ等が発生する場合があるので、必ず密封して、冷暗所に保管す

ること。（冷蔵庫での保管が望ましいが、凍結すると使用できなくなるので注意する。）

- 3). 使用する人以外の人から安易に触れないように保管すること。

【有効期間】

六か月（認証は自社基準による）

【包装】

3kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】＊

製造販売業者及び製造業者：有限会社リーバンオハラ

住所：〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町7-16

電話番号：06-6383-6941 FAX：06-6383-6942