

歯 09 歯科用研磨器材
一般医療機器 歯科用研削材及び研磨剤 JMDN70907000

パラシャイン

【形状、構造及び原理等】＊

【概要】

補綴物の研磨材

【形状、構造】

液体

【原理】

液に浸けることで研磨処理を行う。

【使用目的、効能又は効果】＊

補綴物の研磨に使用する。

【品目仕様等】＊

【試験・検査方法】

金銀パラジウム片をつけて、テスト片と同様の状態になることを確認する。

【操作方法又は使用方法等】

- 1). 技工物の埋没材を完全に除去する。
- 2). 本材をガラス容器に入れ、技工物を漬ける。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 1). 作業の際は、皮膚に付けたり吸入したりしないように適切な保護具を着用すること。（保護手袋、保護メガネ、保護衣、防塵マスクのしようが望ましい）
- 2). 取扱いは換気のきいた場所で行うこと。
- 3). 他の製品と混用しないこと。

【重要な基本的注意】

- 1). 目に入らないように注意すること。万が一眼に入った場合は直ちに大量の水で15分以上洗浄し、直ちに医師の診断を受けること。
- 2). 吸引しないように、換気の良いところで使用すること。万が一気分が悪くなった場合は直ちに新鮮な空気のところであ静にし、保温すること
- 3). 皮膚に付いた場合は、汚染の危険がある場所を全て石鹼水で洗浄し、

多量の水を用いて洗い流すこと。

- 4). 誤飲しないように注意すること。万が一飲込んだ場合はすぐに口をすすぎ、直ちに吐剤や牛乳を与えて吐かせること。その後直ちに医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】＊

【貯蔵・保管方法】

- 1). 直射日光を避け、冷蔵庫など冷暗所で保管すること。
- 2). アルカリ及び可燃物と隔離して保管すること。
- 3). 室内の、安定した場所に保管すること。
- 4). 使用するもの以外の人から安易に触れないように保管すること。

【有効期間】

一年（有効期間は自己認証による。）

【包装】

1 L

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】＊

製造販売業者及び製造業者：有限会社リーバンオハラ

住所：〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町7-16

電話番号：06-6383-6941 FAX：06-6383-6942