

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN コード: 70976000)

メディロープ M-37 ソフトニトリル P.F.

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 過去に湿疹、カブレ等のできた経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : リーブル株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-18
TEL : 03-5822-1131 FAX : 03-5822-1141

製造業者 : Comfort Rubber Gloves Industries Sdn Bhd

製造国 : マレーシア

【形状、構造等】

- (1) 本品はニトリルゴム製の未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋です。
- (2) 本品は左右兼用型です。

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する手袋です。

【品目仕様等】

引張強さ : (老化前) 14 MPa 以上 / (老化後) 14 MPa 以上
切斷時伸び : (老化前) 500 % 以上 / (老化後) 400 % 以上

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 取り出し口より本品を取り出し、着用して下さい。
- (2) 本品を傷付けないように丁寧に着用して下さい。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがありますので、異常を感じましたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
 - (2) 包装や製品に破損・汚損・ピンホール等の異常が認められた場合には使用しないで下さい。
 - (3) 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意して下さい。
2. 一般的な注意
 - (1) 薬品、溶剤等によっては、膨張したり浸透したりする場合がありますので、確認の上、注意して使用して下さい。
 - (2) 本品を使用目的以外には使用しないで下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - (1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管して下さい。
 - (2) 蛍光灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないで下さい。
 - (3) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 使用期限
製造後5年(自己認証)、有効期間は内箱(紙箱)に記載

【包装】

呼び番号	包装	枚数
SS	内箱(紙箱)	200
S	内箱(紙箱)	200
M	内箱(紙箱)	200
L	内箱(紙箱)	200
LL	内箱(紙箱)	200