

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN コード : 70976000)

メディローブ M-29 グッドパック ニトリル P.F. ホワイト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 過去に湿疹、カブレ等のできた経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : リーブル株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-1-18

TEL : 03-5822-1131 FAX : 03-5822-1141

【形状、構造等】

- (1) 本品はニトリルゴム製の未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋です。
- (2) 本品は左右兼用型です。

製造業者 : Hartalega NGC Sdn. Bhd.

製造国 : マレーシア

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する手袋です。

【品目仕様等】

引張強さ : (老化前) 18 MPa 以上 / (老化後) 16 MPa 以上

切断時伸び : (老化前) 500 %以上 / (老化後) 400 %以上

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 取り出し口より本品を取り出し、着用してください。
- (2) 本品を傷付けないように丁寧に着用してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがありますので、異常を感じましたら使用を中止し、医師に相談してください。
 - (2) 包装や製品に破損・汚損・ピンホール等の異常が認められた場合は使用しないでください。
 - (3) 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
2. 一般的な注意
 - (1) 薬品、溶剤等によっては、膨張したり浸透したりする場合がありますので、確認の上、注意して使用して下さい。
 - (2) 本品を使用目的以外には使用しないで下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - (1) 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管してください。
 - (2) 蛍光灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。
 - (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 使用期限
製造後 5 年 (自己認証)、有効期間は内箱 (ポリ袋) に記載。

【包装】

呼び番号	包装	枚数
SS	内箱 (ポリ袋)	100
S	内箱 (ポリ袋)	100
M	内箱 (ポリ袋)	100
L	内箱 (ポリ袋)	100