

機械器具 11 放射線障害防護用器具




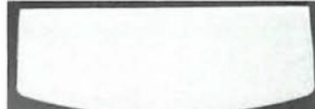
一般医療機器 放射線防護用掛布 JMDN：38357000

PRYDWEN 放射線防護具

【禁忌・禁止】

本品は単回使用製品であるため、再使用しない。

【形状、構造及び原理】

| 型式名 | 形状 | 使用部位 |
|-------|--|------|
| BA001 |  | 眼球 |
| CA002 |  | 胸部 |
| AA003 |  | 腹部 |
| GA004 |  | 生殖器 |

【作動・動作原理】

本品に含まれる遮蔽材を体の一部に合うように固定することにより、不必要な放射線被ばくから装着部分を保護する。

【使用目的又は効果】

本品は、診断及び治療のための医科又は歯科処置における不必要な放射線被ばくから患者、医療関係者、又は他の人員の体の特定部分を保護するために使用する個人用防護装置である。

【使用方法等】


本品を使用するにあたり、取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

〈使用前準備〉

1. 患者の体格、部位にあった型式を選択する。
2. 本品に損傷がないことを確認する。
3. 本品に外観上変形や異物がないことを確認する。
4. 耐用期間内であることを確認する。

〈使用方法〉

1. 包装紙を剥がし、本品を取り出す。
2. 医療用両面テープの剥離紙を剥がす。
3. 保護が必要な部位に本品を取り付ける。
4. 医療用両面テープが患者にしっかりと貼り付けられていることを確認する。

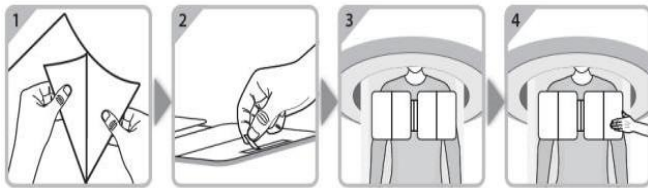

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品を使用目的以外の目的・用途で使用しない。
2. 使用前に本品の包装が破損している場合は使用しない。

3. 損傷した本品は使用しない。
4. 耐用期間を超過した本品は使用しない。

〈使用後の注意〉

1. 本品は単回使用製品であるため、使用後は廃棄する。
2. 必ず地方自治体の条例・規則に従い廃棄する。

【保管方法及び耐用期間】

〈保管方法〉

直射日光や高温多湿を避けて保管する。

〈耐用期間〉

本体：2年〔自己認証による〕

ただし、耐用期間は保管環境により差異が生じることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社リベルワークス

外国製造業者：JUNGHWA BIO CO., LTD（韓国）

取扱説明書を必ずご参照ください