

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010  
リチャードウルフ メンブレンバルブ

**【警告】**

**適用対象（患者）**

- ・伝達性海绵状脳症（及び関連疾患）等の感染疾患の診断を受けた患者（可能性のある患者を含む）に使用する場合は、他の患者及び使用者等に感染しないよう予防措置を講じること。[感染が拡大する恐れがある]

**使用方法**

- ・本品は未滅菌品である。必ず適切な方法で洗浄・滅菌してから使用すること。[患者に危害を加える恐れがある]

**【禁忌・禁止】**

**併用医療機器**

- ・取扱説明書にて指定されている機器のみを接続使用し、それ以外の機器は使用しないこと。[本品が損傷したり、使用者が負傷するおそれがある]

**使用方法**

- ・本品に過度な力を与えないこと。[本品が損傷するおそれがある]

**【形状・構造及び原理等】**



**【使用目的又は効果】**

単一又は複数の内視鏡部品を接続・統合して完全な内視鏡アセンブリを作製したり、又は他の装置（レーザー等）の接続を可能にするために用いる。

**【使用方法等】**

**使用方法**

本品は未滅菌品であるので、使用予定の硬性鏡とバルブホルダ（いずれも構成品外別品目）間に本品を挿入した状態で共に滅菌を行ってから使用すること。滅菌方法として蒸気滅菌、過酸化水素プラズマ滅菌、ガス滅菌、過酢酸滅菌が可能であるが、以下の条件下での蒸気滅菌が推奨される：

＜蒸気滅菌＞132～138℃にて4分間

**使用方法に関連する使用上の注意**

- ・本品と接続する併用機器について、本品に適合するものか予め確認すること。[本品が損傷したり、使用者が負傷するおそれがある]
- ・使用前後毎回、点検を行うこと。破損している、完全性に欠けている場合は使用しないこと。[本品及び併用機器が損傷・故障するおそれがある。使用者が負傷するおそれがある]
- ・本品に過度な力を与えないこと。[本品が損傷するおそれがある]
- ・洗浄の際、プラスチック部分は、金属製又は縁が角ばった補助道具（例、ブラシ）で洗浄しないこと。[本品が損傷するおそれがある]
- ・低温滅菌法で滅菌する場合、異なる滅菌方法を交互に選択しないこと（例えば、過酸化水素プラズマ滅菌及び過酢酸滅菌）。[本品が損傷するおそれがある。滅菌効果が不十分になるおそれがある]

**【使用上の注意】**

**相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）**

**併用注意（併用に注意すること）**

- ・本品と併用する機器の取扱説明書等を参照すること。[不適切な使用により、本品が損傷したり、使用者が負傷するおそれがある]
- ・併用機器を使用する場合は、有効長及び外径等が本品に適合するものか予め確認すること。[本品が損傷するおそれがある]

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・水の掛からない清浄な場所に保管すること。
- ・温度、湿度、日光、埃、塩分、硫黄を含んだ空気、気圧等により悪影響を受けない場所に保管すること。
- ・振動のある場所、不安定な場所、化学薬品の保管場所及びガスが発生する場所には保管しないこと。

＜操作／保管条件＞

温度： 10℃～40℃／-20℃～60℃

湿度： 30%～75%／10%～90%

気圧： 700hPa～1060hPa／700hPa～1060hPa

**【保守・点検に係る事項】**

附属の取扱説明書を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

選任製造販売業者（問い合わせ先）：

リチャードウルフ株式会社

〒108-0071 東京都港区白金台2-26-10

電話番号：03-6459-3939

外国製造業者：

Richard Wolf GmbH（ドイツ）

**ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。**

P23-A1