

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引器用キャニスタ (コード: 34858000)

再使用禁止: 貯蔵ボトル

R. Wolf 灌流・吸引装置用アクセサリ 2

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 再使用禁止・再滅菌禁止:
貯蔵ボトル

【形状・構造及び原理等】

1. 構成


本品は「貯蔵ボトル(単回使用タイプ)」であるが、以下のとおり他品目とともに構成して、使用することができる。

- 1) 貯蔵ボトル
- 2) 吸引チューブ(本届出対象外)
- 3) 真空チューブ(本届出対象外)
- 4) 廃液ボトル(2L/3L)(本届出対象外)

なお、上記は組み合わせで、または単品で販売される。

2. 形状

貯蔵ボトル

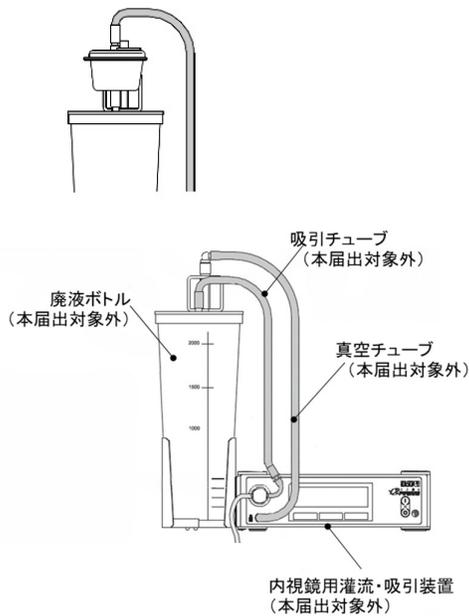

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡用灌流・吸引装置や内視鏡用電動切除器具等を組合せて使用する際に用いる、組織の回収のために使用するキャニスタである。廃液ボトル、及び廃液ボトルと内視鏡用灌流・吸引装置を接続するチューブ等とともに使用される。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 再使用可能な廃液ボトルと真空チューブは、洗浄後に使用すること。
- 2) 破損等の異常がないことを確認する。

2. 操作

- 1) 内視鏡の吸引用ポートに吸引チューブを接続する。
- 2) 吸引チューブを廃液ボトルに接続する。必要に応じて貯蔵ボトルをセットして接続する。
- 3) 内視鏡用灌流・吸引装置と廃液ボトルを真空チューブで接続する。
- 4) 内視鏡用灌流・吸引装置を操作し、浸出液、組織等の吸引を行う。

3. 使用後

- 1) 吸引チューブ、真空チューブ、廃液ボトル、貯蔵ボトルを取り外す。
- 2) 吸引チューブ、単回使用の廃液ボトル、貯蔵ボトル、真空チューブのフィルタは一回限りの使用で再使用できない。使用後は廃棄する。

4. 併用する医療機器

本品は以下の医療機器との併用が可能である。

| 名称 | 販売名/ 一般的名称(コード) | 届出番号/ 製造販売業者 |
|------------------|--|---|
| 吸引チューブ(単回使用タイプ) | R. Wolf 灌流・吸引装置用アクセサリ 送水吸引チューブ(70355000) | 13B1X10183P00058 リチャードウルフ(株) |
| 真空チューブ(再使用可能タイプ) | R. Wolf Arthro/Urology ポンプ用チューブ R. Wolf 灌流・吸引装置用アクセサリ 送水吸引チューブ(70355000) | 13B1X10183P00056 13B1X10183P00058 リチャードウルフ(株) |
| 廃液ボトル(単回使用タイプ) | R. Wolf Arthro/Urology ポンプ用チューブ 送水吸引チューブ(70355000) | 13B1X10183P00056 リチャードウルフ(株) |

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 使用前に廃液ボトル、廃液ボトルが確実に接続されていることを確認すること。
- 2) 使用後は医療廃棄物として各自治体の規則を順守して廃棄すること。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- 1) 内視鏡用灌流・吸引装置のローラポンプに吸引チューブを取り付ける際は、クランプにまっすぐ差し込むこと。この際、チューブがコネクタに挟まれていないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1) 直射日光、高温、多湿を避けて、清潔な室内で保管すること。
- 2) 医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。

【保守・点検に係わる事項】

- 1) チューブ及びボトルに破損や劣化の兆候が無いことを確認してから使用すること。破損や劣化の兆候を認めた場合は使用しないこと。
- 2) 廃液ボトルは、蓋とボトル、その他の部品を分解して滅菌すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者（問い合わせ先）：

リチャードウルフ株式会社
〒108-0071 東京都港区白金台 2-26-10
電話番号：03-6459-3939

製造業者：

Richard Wolf GmbH (ドイツ)

ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。