

機械器具 3 2 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ 3 8 7 4 9 0 0 0
M&R 吸引管

【警告】

・本品は、医師および医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが使用すること。

【形状・構造及び原理等】

吸引器具に接続できる管

【使用目的又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する。

【使用方法等】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌する。
2. 吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する。

【使用上の注意】

包装の破損したものや、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 滅菌前、使用前に外観に異常がないか確認して下さい。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌して下さい。
134℃/5 分の高圧蒸気滅菌条件を推奨します。
3. 汚れが乾燥し、落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄して下さい。
4. 使用後は、水でよく通水洗浄して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社リアクトシステム
TEL. 06-6586-9344