

**R T 麻酔回路 (バクテリアフィルター)**

再使用禁止

**【警告】**

使用方法

- ・使用する前に本品の接続に誤りがないこと、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実にあり、接続部と回路にガス漏れや閉塞がないことを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]

**【禁忌・禁止】**

使用方法

- ・再使用禁止。
- ・バクテリアフィルターは、24時間を超えて使用しないこと。
- ・分泌物過多の患者や喀痰が血性である患者への使用禁止。[流量抵抗が上昇したり、回路が閉鎖したりするおそれがある。又、人工呼吸器との併用においては、呼吸回路に外れが生じた場合でも、低圧警報が作動しないおそれがある。]
- ・本品は、可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと。[本品は非導電性であり、爆発のおそれがあるため。]

併用医療機器

- ・患者と回路のYコネクタとの間にフィルターを接続する場合は、ネプライザを併用しないこと。[フィルターが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]
- ・本品のフィルターを呼吸側 22mm コネクタに取り付けた回路において、ネプライザ療法を行う場合、粘稠な薬剤は十分に注意して投与すること。[フィルターが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]

**【形状・構造及び原理等】**

本添付文書は、バクテリアフィルターについて記載している。

1. 構成

(1) バクテリアフィルター

- (1)-1 バクテリアフィルター
- (1)-2 人工鼻+バクテリアフィルター
- (1)-3 バクテリアフィルター（サンプルポート付）

\*\* (1)-4 人工鼻+バクテリアフィルター（Pタイプ）

2. 形状



(1)-1 バクテリアフィルター



(1)-2 人工鼻+バクテリアフィルター



(1)-3 バクテリアフィルター  
（サンプルポート付）

\*\*



(1)-4 人工鼻+バクテリアフィルター  
（Pタイプ）

	(1)-1 バクテリアフィルター	(1)-3 バクテリアフィルター（サンプルポート付）
流量抵抗 (Pa) (30L/分時)	58	83
死腔量 (mL)	55	36
一回換気量 (mL) >	165	108
フィルタ方式	静電式	静電式
バクテリア除去率 (%)	99.99	99.99
ウイルス除去率 (%)	99.9	99.9

\*\*

	(1)-2 人工鼻+バクテリアフィルター	(1)-4 人工鼻+バクテリアフィルター（Pタイプ）
流量抵抗 (Pa) (30L/分時)	142	130
死腔量 (mL)	45	42
一回換気量 (mL) >	135	126
フィルタ方式	静電式	静電式
バクテリア除去率 (%)	99.90	99.99
ウイルス除去率 (%)	99.9	99.9
水分損失 (gm <sup>3</sup> )	1~3 時間使用時：28.9 1~24 時間使用時：29.1	37.3 mg (VT500mL 時)
ガス漏れ (mL/分)	0	0

**【使用目的又は効果】**

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

**【使用方法等】**

- 1) フィルターを蛇管の呼吸側若しくは吸気側の 22mm（又は 15mm）コネクタ又は患者側コネクタに接続して使用する。
- 2) ガスのサンプリングを行う場合は、CO<sub>2</sub> ガスサンプルラインをサンプルポートに接続する。
- 3) 使用後は、医療廃棄物として適切に廃棄すること。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・全ての接続部やポートキャップに緩みや外れが生じていないことを確認すること。
- ・患者を注意深くモニターすること。異変が見られる場合は、本品を取り外すか、新品に取り替えること。
- ・他の器具と接続して使用する場合は、十分に吸気・排気を確保する回路となっていることを確認して使用すること。[回路が閉塞するおそれがある。]
- ・使用時間が 24 時間に達する前でも、分泌物が溜まったときなど必要に応じて新品に交換すること。

**【使用上の注意】**

## &lt;重要な基本的注意&gt;

- ・本品は一人の患者のみに使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

## &lt;保管方法&gt;

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

## &lt;有効期間&gt;

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

## &lt;製造販売業者&gt;

株式会社リコオテクノ  
TEL : 03-5577-6133 (代)

## &lt;外国製造業者&gt;

Hsiner Co., Ltd.  
シーナ社(台湾)