

添付文書

*2020年3月作成（第2版）

2018年11月作成（第1版）

医療機器認証番号：230AFBZX00088000

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器 麻酔回路セット(70567000)

R T 麻酔回路 (コネクタ)

再使用禁止

【警告】

- ・他の製品と組み合わせて使用するときは、その接続状態に閉塞等の危険がないか必ず確認すること。

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止。
- ・本品は洗浄又は滅菌をしないこと。[有害物質の残留のおそれや、接続部の変形・破損により漏れを起こすおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

本添付文書は、コネクタについて記載している。

1. 構成

- (1) コネクタ
 - (1)-1 エルボー
 - (1)-2 エルボー（サンプルポート付）
 - (1)-2-1 タイプ1
 - (1)-2-2 タイプ2
 - (1)-3 エルボー（回転式）
 - (1)-4 エルボー（回転式、サンプルポート付）
 - (1)-5 エルボー（ガスライン接続用）
 - (1)-6 Y字管（成人患者回路用）
 - (1)-6-1 タイプ1
 - (1)-6-2 タイプ2
 - (1)-7 Y字管（成人患者回路用サンプルポート付）
 - (1)-8 回転式Y字管（成人患者回路用）
 - (1)-9 Y字管（小児患者回路用）
 - (1)-10 ホースカフ（成人患者回路用）
 - (1)-11 ホースカフ（小児患者回路用）
 - (1)-12 ストレートコネクタ
 - (1)-12-1 タイプ1
 - (1)-12-2 タイプ2
 - (1)-13 ストレートコネクタ（マンオメーター接続用）
 - (1)-14 コネクタ（6mm：15mm）
 - (1)-15 カテーテルマウント
 - (1)-15-1 カテーテルマウント（サンプルポートなし）
 - (1)-15-1-1 タイプ1
 - (1)-15-1-2 タイプ2
 - (1)-15-1-3 タイプ3
 - (1)-15-2 カテーテルマウント（サンプルポート付）
 - (1)-15-2-1 タイプ1
 - (1)-15-2-2 タイプ2

2. 形状

例として、(1)-1 エルボーの形状を示す。



【使用目的又は効果】

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

- 1) 破損、汚れがないか確認する。
- 2) 使用後は、医療廃棄物として適切に廃棄すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は一人の患者のみに使用すること。
- ・全ての接続部やポートキャップに緩みや外れが生じていないことを確認すること。
- ・加温加湿器に呼吸管をつなげた場合の最高稼働温度は45℃である。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社リコオテクノ
TEL：03-5577-6133（代）

<外国製造業者>

Hsiner Co., Ltd.
シーナ社(台湾)