

\*2019年5月作成(第2版)  
2018年11月作成(第1版)

## 添付文書

医療機器認証番号：230AFBZX00088000

機械器具 06 呼吸補助器  
管理医療機器 麻酔回路セット(70567000)

### RT麻酔回路 (アクセサリ)

再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

使用方法  
・再使用禁止。

#### \*【形状・構造及び原理等】

本添付文書は、アクセサリについて記載している。

##### 1. 構成

###### (1) アクセサリ

- (1)-1 CO<sub>2</sub>ガスサンプルライン 3m
- (1)-2 フレッシュガスライン
- (1)-3 結束用クリップ
- (1)-4 マノメーター (60cm H<sub>2</sub>O)

##### 2. 形状

###### (1) アクセサリ

- (1)-1 CO<sub>2</sub>ガスサンプルライン 3m



- (1)-2 フレッシュガスライン (チューブ長：2m)



- (1)-3 結束用クリップ



- (1)-4 マノメーター (60cm H<sub>2</sub>O)



- 3) フレッシュガスチューブを使用する場合は、フレッシュガスチューブを介して、酸素供給ラインとエルボー（ガスライン接続用）を接続し、患者側端にガスが流れていることを確認する。
- 4) 使用後は、医療廃棄物として適切に廃棄すること。

#### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は一人の患者のみに使用すること。
- ・全ての接続部に緩みや外れが生じていないことを確認すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社リコオテクノ  
TEL：03-5577-6133（代）

<外国製造業者>

Hsiner Co., Ltd.  
シーナ社(台湾)

#### 【使用目的又は効果】

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

#### 【使用方法等】

- 1) 破損、汚れがないか確認する。
- 2) 適切に確実に接続する。