

サライバクリア

再使用禁止

Saliva Clear

【禁忌・禁止】

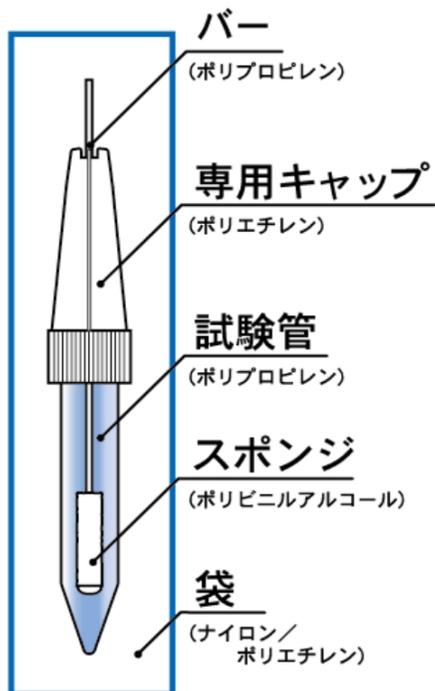
<使用方法>

再使用禁止

麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

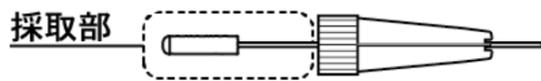
プラスチック軸の片側先端部に綿球を付け、それをキャップに取り付けた滅菌綿棒と試験管をセットにしたものである。

**【使用方法等】**

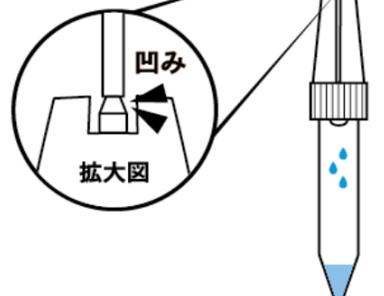
1. 袋を開封し専用キャップを回して取り外してください。
2. スポンジをあめ玉のように舐めて唾液を採取してください。
3. スポンジが柔らかくなれば試験管に戻し、ゆるみや外れが生じないように専用キャップをしっかり締めてください。
4. バーを上引っ張り凹みが見えるまで移動させてください。
5. バーを左右に倒し凹みより切断してください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- A) 採取部は絶対に手で触れないでください。



- B) バーを引っ張り凹みまで移動できない場合はスポンジに十分な唾液が浸透していません。バーを戻し使用方法等1. からやり直してください。

**【使用目的又は効果】**

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とした器具を言う。アプリケーションには様々な種類があり、通常、専用の機能を持つ。

【使用上の注意】

1. 本品は滅菌済みであり個包装の破れや穴等があった場合は使用しないこと。
2. 本品に破損や汚れなどの異常を認めた時は使用しないこと。
3. 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
4. 個包装を開封した後は速やかに使用すること。
5. 本品は滅菌を施しており、その影響でプラスチックが着色している場合があるが使用できる。
6. 検体を採取するとき、採取する部位の粘膜等を傷つけないように、無理な力をかけないこと。
7. 全ての検体は病原菌等に汚染されているものとして注意して取り扱うこと。
8. 採取した検体は速やかに検査すること。
9. 本品は検体採取、保存、輸送以外に使用しないこと。
10. 使用後は速やかに滅菌して廃棄すること。廃棄の際は、医療用廃棄物等に関する規定や水質汚濁防止法等の各種規制に従い、各施設の責任において処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光と衝撃を避け、常温（5～30℃）で保管すること。

使用期限：外袋に記載（自己認証による）

【包装】

個包装×50キット

500キット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社臨床検査器材

〒270-0176 千葉県流山市加1-6-2

TEL:04-7159-1177 FAX:04-7159-1277