

2023年12月(第1版)

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：04B3X10013000001

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDN コード 71105001

## リライブシャツα

### 【禁忌・禁止】

- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- ・皮膚にかぶれ、湿疹、傷などの異常がある場合は使用しないこと。

### 【使用目的又は効果】

本製品は遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

#### 【遠赤外線の血行促進作用】

- ・疲労の回復・改善
- ・冷え性の改善
- ・血行促進
- ・筋肉のハリ、コリの改善
- ・筋肉の疲れを軽減
- ・腰痛・肩こり・関節痛の緩和
- ・新陳代謝の促進による運動効率の向上

### 【使用方法】

- ・上半身に適したものを衣類製品と同じく着用する。
- ・本製品は再使用可能である。

### 【保管方法及び有効期間】

- ・通常の衣類と同じく、高温、多湿な環境を避けて保管する。
- ・長期間使用しないときは、乾かした後、湿気のない場所で保管する。

#### 耐用期間

1年

### 取扱い上の注意

本製品は繰り返し使用可能であるが、素材の特性上無理な力を加えたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので、注意すること。

### 【形状・構造及び原理】

#### 1.形状・構造

##### ■リライブシャツα



寸法	身長	胸囲	袖長	肩幅	裾幅
単位	cm	cm	cm	cm	cm
標準	170	90	25	45	20
最大	180	100	26	46	21

##### ■ 鉱石プリント加工位置



身幅肩縫い目から2センチ

#### 2.原理

本製品は生地のリチアトルマリン、テラヘルツ鉱石を含んだ特殊なプリント加工を施し、一定程度の遠赤外線を輻射する素材を使用した製品であり、着用することで遠赤外線による血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

#### 3.原材料

リチアトルマリン/テラヘルツ（珪素）  
ポリエステル  
プリントインク

#### 【使用上の注意】

- 筋肉に鉱石の作用で刺激を与えているため、長時間着用して疲れを感じる場合には休みを入れながら使用すること。
- オーバーワークに注意すること。  
いつもより体が動くため、つい無理をしがちとなるが、今までと同じ運動量にとどめ、十分な休息をとること。
- 内側にプリントが施されている商品を直接肌の上に着用する場合、人によっては肌が荒れる可能性がある。その場合、直ちに着用を中止し医師の診断を受ける、または薄手の肌着の上から着用などの対応をすること。
- 持病をお持ちの方、妊婦の方などは医師に相談の上着用すること。
- 洗濯はネットに入れ乾燥機は避け、できるだけ日陰干して乾燥させること。手洗いの場合は押し洗いをすること。
- 洗濯の際に、多少色落ちする場合がある。

#### 【包装】

1枚/ジッパー付き密閉網布袋

#### 【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社りらいぶ  
〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘三丁目27番地の3  
オメガコートササキビル  
電話：022-343-1250