

機械器具(06) 呼吸補助器  
高度管理医療機器  
汎用人工呼吸器 70561000 (二相式気道陽圧ユニット 36990000)

「NIPネーザルV」の付属品

再使用禁止

抗菌フィルタ [丸型]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



2. 寸法

長さ: 67mm

【使用目的又は効果】


1. 使用目的

院内および在宅における、  
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の  
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。  
生命維持を目的とするものではない。

【使用方法等】

(1) 使用前の操作

- ① 本体を水平な場所に置く。
- ② AC電源コードを本体後部に接続する。
- ③ AC電源コードの他端をACコンセントに差し込む。
- ④ 本品を、エアチューブ接続口に接続する。
- ⑤ エアチューブを本品に接続する。
- ⑥ 人工呼吸器用マスクをエアチューブの他端に接続する。

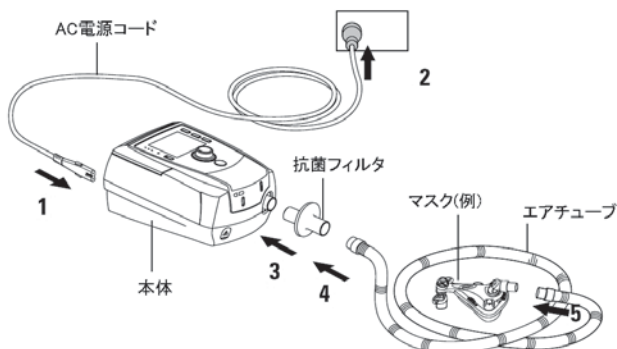

(2) 以降の操作は「NIPネーザルV」本体の操作に準ずる。

\* (3) 併用医療機器

本品は、下表の医療機器にも使用できる。

販売名	承認番号
オートセットCS-A	22500BZX00364000
レスメドAirCurve 10 CS-A TJ	22900BZI00028000

【使用上の注意】

- 加湿器 (ヒューミドエアー4i) と本品を併用しないこと。[換気が困難となるおそれがある。]
- 加湿器 (ヒューミドエアー5i) と本品を併用しないこと。[換気が困難となるおそれがある。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用期限

- 個別包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

レスメド株式会社

TEL03-5829-4410

製造業者:

\*\* ResMed Pty Ltd / レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)



社内管理コード  
L415X1123A-08