

「NIP ネーザル V」の付属品 抗菌フィルタ [丸型]

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図



2. 寸法

長さ:67mm

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

院内および在宅における、自発呼吸のある、成人および小児(13kg以上)の呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。
生命維持を目的とするものではない。

【使用方法等】


** 1. オートセット CS-A、NIP ネーザル V、スリープメイト 10 又はレスメド AirCurve 10 CS-A TJ に接続する場合

(1) 使用前の操作

- ① 本体を水平な場所に置く。
- ② AC 電源コードを本体後部に接続する。
- ③ AC 電源コードの他端を AC コンセントに差し込む。
- ④ 本品を、エアチューブ接続口に接続する。

** (スリープメイト 10 又はレスメド AirCurve 10 CS-A TJ の場合はチューブエルボーコネクタを介して接続する。)

- ⑤ エアチューブを本品に接続する。
- ⑥ 人工呼吸器用マスクをエアチューブの他端に接続する。

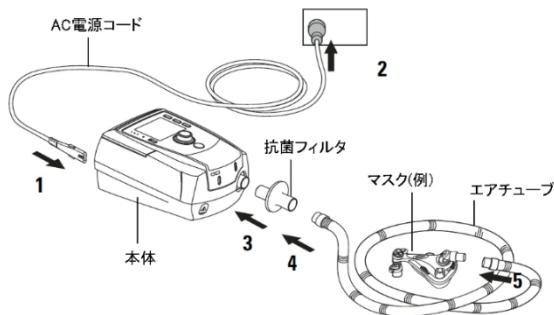


** (2) 以降の操作は併用する機器本体の操作に準ずる。

** 2. スリープメイト 11 に接続する場合

** (1) 使用前の操作

- ** ① 装置本体を水平な場所に置く。
- ** ② AC 電源コードを装置本体後部に接続する。
- ** ③ AC 電源コードの他端を AC コンセントに差し込む。
- ** ④ エアチューブを、アウトレットコネクタに接続する。
- ** ⑤ 本品をエアチューブの他端に接続する。
- ** ⑥ 人工呼吸器用マスクを本品に接続する。

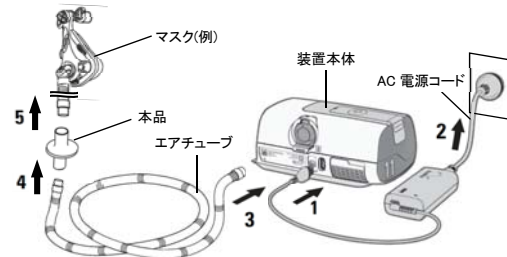

** (2) 以降の操作は併用する機器本体の操作に準ずる。

** 3. 併用医療機器

本品は、下表の医療機器にも使用できる。

販売名	承認番号
オートセット CS-A	22500BZX00364000
レスメド AirCurve 10 CS-A TJ	22900BZI00028000
スリープメイト10	22700BZI00027000
スリープメイト11	30300BZX00343A01

【使用上の注意】

- ・ 加湿器(ヒューミドエアー4i)と本品を併用しないこと。[換気が困難となるおそれがある。]
- ・ 加湿器(ヒューミドエアー5i)と本品を併用しないこと。[換気が困難となるおそれがある。]

** 【保管方法及び有効期間等】

1. 使用期限

個別包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

レスメド株式会社

03-5829-4410

製造業者:

* ResMed Pty Ltd /レスメド ピーティーワイ リミテッド (オーストラリア)