

機械器具(06) 呼吸補助器
高度管理医療機器
汎用人工呼吸器 70561000 (二相式気道陽圧ユニット 36990000)
「NIPネーザルV」の付属品
T字形アダプタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



2. 寸法

長さ: 79mm

【使用目的又は効果】

1. 使用目的


院内および在宅における、
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。
生命維持を目的とするものではない。

【使用方法等】

(1) 使用前の操作

- ① エアチューブを本品に接続する。
- ② FiO₂センサを本品に接続する。
- ③ 本品の他端を本体のエアチューブ接続口に接続する。
- ④ 外部ケーブルをFiO₂センサに接続する。
- ⑤ 外部ケーブルの他端を本体後部のFiO₂センサ接続口に接続する。
- ⑥ 較正および測定を開始する。

(2) 以降の操作は「NIPネーザルV」本体の操作に準ずる。

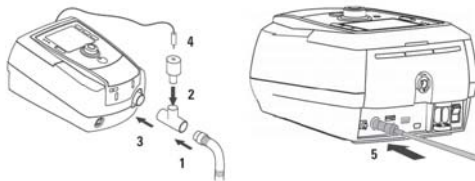

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用期限

- 包装袋に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

レスメド株式会社

* TEL03-5829-4410

製造業者:

** ResMed Pty Ltd / レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)