

機械器具(06) 呼吸補助器
高度管理医療機器
汎用人工呼吸器 70561000 (二相式気道陽圧ユニット 36990000)
「NIPネーザルV」の付属品
低圧酸素コネクタ



社内管理コード
L415X11270-05

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図



2. 寸法

長さ: 31mm

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

院内および在宅における、
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。
生命維持を目的とするものではない。

【使用方法等】

(1) 使用前の操作

- ① 本品を本体の酸素コネクタ接続口に接続する。
 - ② 本品の他端に酸素供給用チューブを接続する。
- (2) 以降の操作は「NIPネーザルV」本体の操作に準ずる。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- * ● 酸素を使用する場合、装置が停止している間は、酸素も止めること。
[装置が動作していない場合に、酸素が流れると装置内に酸素が
充満し、火災が発生する危険がある]
- * ● 酸素を使用する場合、患者回路と酸素供給源は、点火源(電気
機器等)から2m以上離すこと。
- * ● 酸素を使用する際には、安全が保証され、清浄な酸素供給源を
使用すること。
- * ● 酸素には可燃性がある。喫煙中または直火のある場所では酸素
を使用しないこと。酸素は換気の良い場所でのみ使用すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- * ● 可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素環境雰囲気下、その他可燃性
や爆発のおそれがある物質の存在する環境では、使用しないこと。
[爆発および火災発生の危険がある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

レスメド株式会社

- * TEL03-5829-4410

製造業者:

- ** ResMed Pty Ltd / レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)